



product booklet

price list

The World Best Microneedling Rollers

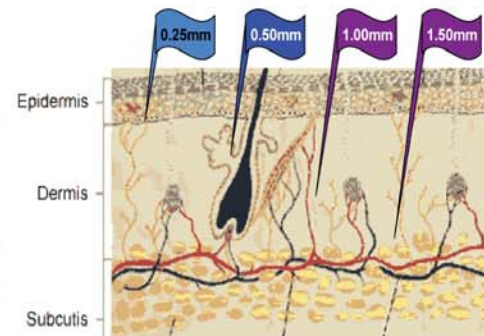


GENOSYS

Η GENOSYS διαθέτει μια πλήρη σειρά από Skin Needle roller για το πρόσωπο, το σώμα, το κεφάλι και τα μάτια με διεθνείς πατέντες σχεδιασμού, καινοτομίας και ασφάλειας στη χρήση καθιστώντας τη ως την μεγαλύτερη παραγωγό roller στον κόσμο. Στη σειρά περιλαμβάνονται roller με δόνηση για την αισθητή μείωση και ελαχιστοποίηση του πόνου και roller με αποσπώμενες κεφαλές για την σημαντική μείωση του κόστους.

Σειρά προϊόντων

DTS standard manual roller	πρόσωπο	0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 mm
DTS narrow manual roller	πρόσωπο, κεφάλι	0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 mm
DTS vibrating roller	πρόσωπο	0.25, 0.5, 1, 1.5 mm
DTS body roller	σώμα	0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 mm
DTS Stamp	πρόσωπο, κεφάλι	0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 mm
DTS eye manual roller	μάτια	0.25, 0.5 mm
Αποσπώμενες κεφαλές	πρόσωπο, σώμα, κεφάλι	0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 mm



Τι είναι το DTS (Disk Needle Therapy System)

Το microneedling εισχωρεί στην επιδερμίδα και το χόριο δημιουργώντας μικροσκοπικούς δίοδους, οι οποίοι ενισχύουν τη διείσδυση διαδερμικών διαλυμάτων και την απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων, σημαντικοί για την παραγωγή νέου κολλαγόνου.

Το DTS (Disk Needle Therapy System) της GENOSYS είναι το πιο καινοτόμο microneedling σύστημα με μοναδικά χαρακτηριστικά όσο αφορά τη μέθοδο παράγωγης, λειτουργία (δόνηση), σχεδιασμό και αποτελεσματικότητά.

Το DTS μπορεί να εφαρμοστεί και συνεργικά με άλλες θεραπείες όπως IPL, Sono/Ionto/Electrophoresis/Cryo, FRAXEL, Χημικά peeling

Κατάλληλο για όλους τους τύπους και καταστάσεις του δέρματος

Μήκος Βελόνας	Χρήση	Μηχανισμός	Εφαρμογή
1.5/2.0mm	Ιατρική	Αυξάνει την απορρόφηση Φυσική πρόκληση κολλαγόνου	Ρυτίδες, ουλές από ακμή & έγκαυμα, lifting, lifting σώματος, σύσφιξη, ραγάδες, πόροι, τόνος και υφή δέρματος
1.0mm			
0.5mm	Επαγγελματική	Αυξάνει την απορρόφηση Φυσική πρόκληση κολλαγόνου (ήπια)	Υπερμελάγχρωση, λεπτές γραμμές, τριχόπτωση
0.25mm	Οικιακή	Αυξάνει την απορρόφηση	Μεγιστοποιεί τη δράση καλλυντικών προϊόντων

Τεχνολογικές καινοτομίες και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Αριθμός βελονών	540 βελόνες, 9 δίσκοι Χ60 βελόνες	500,000 μικροδίοδοι σε 10 λεπτά
Πάχος/ διάμετρος βελόνας	0,2 mm	Ελαχιστοποίηση πόνου και ερεθισμού, μείωση του χρόνου αποθεραπείας στο μισό
Υλικό δίσκου & βελόνας	Ανοξείδωτο ατσάλι	Ασφάλεια

Τεχνολογία βελόνας/ δίσκου

GENOSYS



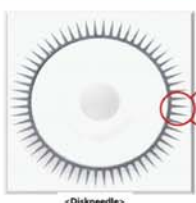
Οι βελόνες είναι ένα σώμα με το δίσκο, δεν διατρέχει κίνδυνος αποκόλλησης τους και διαθέτουν μεγάλες μηχανικές αντοχές.
Πατενταρισμένη τεχνολογία

ΑΛΛΑ



Οι βελόνες είναι ξένο σώμα από τον δίσκο, υψηλός κίνδυνος αποκόλλησης και παραμονής της βελόνας στο δέρμα.

Γωνία κλίσης μεταξύ των βελόνων



Η γωνία κλίσης μεταξύ των βελόνων στο microneedling της GENOSYS είναι στις 6 μοίρες ενώ σε άλλα roller είναι στις 14,5 μοίρες.
Πατενταρισμένη τεχνολογία

Γιατί η γωνία κλίσης μεταξύ των βελόνων είναι τόσο σημαντική ;

Όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα ασκεί την ίδια πίεση όσο ένα roller σε μορφή στάμπας και το διαπερνά κάθετα, με αποτέλεσμα ο πόνος να είναι ανεπαίσθητος και η περίοδος επούλωσης πιο σύντομη.

Σχήμα κοπής βελόνας

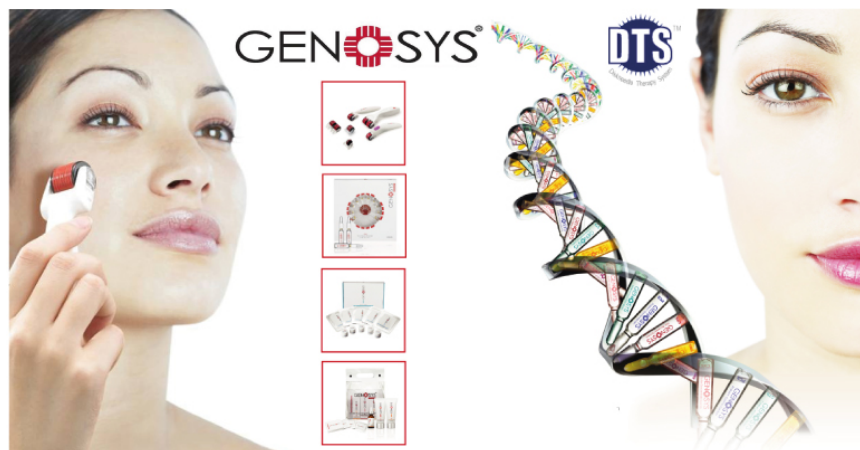
GENOSYS



Η κοπή της βελόνας σε σχήμα διαμαντιού επιφέρει λιγότερο πόνο κατά την εισχώρηση της στο δέρμα σε σχέση με τις βελόνες σε σχήμα κυλίνδρου. **Πατενταρισμένη τεχνολογία**

ΑΛΛΑ





περιεχόμενα

1. DTS microneedling roller – πλεονεκτήματα
2. προϊόντα **προσώπου** Genosys
3. πρωτόκολλο θεραπείας με ρολλερ
4. προϊόντα **ματιών** Genosys
5. πρωτόκολλο θεραπείας με ρολλερ
6. προϊόντα **μαλλιών** Genosys
7. πρωτόκολλο θεραπείας με ρολλερ
8. προϊόντα **λαιμού & ντεκολτέ** Genosys
9. πρωτόκολλο θεραπείας με ρολλερ
10. προϊόντα **σώματος** Genosys
11. πρωτόκολλο θεραπείας με ρολλερ σώματος
12. αντενδείξεις
13. τιμοκατάλογος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Pre Needling Μάσκα - EZ CO2 Mask

Έιδος	Μάσκα
Κωδικός	GEZJCM01
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 5 σωληνάρια & 5 μάσκες (για 5 εφαρμογές)
PH	Τζέλ : 2.5 / φύλλο μάσκας: 8
Χρήση	Για 1 μόνο χρήση
Περιγραφή	Μία μάσκα που ενεργοποιεί και προετοιμάζει το δέρμα, έτσι ώστε το δέρμα να μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τα ενεργά συστατικά τα οποία θα διεισδύσουν με το Microneedling
Οφέλη	✓ Συνιστάται σε σκούροχρωμα , άτονα, θαμπά και με χρωματική ανομοιομορφία δέρματα ✓ Συνιστάται στην ακμή ✓ Αντι-φλεγμονώδης δράση ✓ Μειώνει το τοπικό λίπος στο διπλοσάγονο ✓ Βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος και την ελαστικότητα
Αποτελέσματα	✓ Λεύκανση του δέρματος Το δέρμα εμφανίζει ορατά αποτελέσματα φωτεινότητας και λάμψης μόνο σε 10 - 15 λεπτά μετά τη χρήση της μάσκας. ✓ Τοπικό Αδυνάτισμα Έπιδρά στη διαμόρφωση του περιγράμματος του προσώπου και είναι αποτελεσματική στην καταπράυνση των πρησμένων βλεφάρων. ✓ Βελτίωση της υφής του δέρματος Βελτιώνει τον τόνο και την υφή του δέρματος. ✓ Αντιφλεγμονώδη δράση Η φλεγμονή συχνά οδηγεί στην εμφάνιση τραχιού δέρματος. Η κατάσταση του δέρματος βελτιώνεται με την αναστολή της φλεγμονής. ✓ Βελτίωση της ροής του αίματος Τα ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει να μεταφερθούν σε κάθε μέρος των τριχοειδών αγγείων στο δέρμα. Το αίμα ρέει και παρέχει οξυγόνο σε κάθε κύτταρο. Το CO2 απορροφάται από το δέρμα και λειτουργεί για να καθαρίζει το αίμα. ✓ Επιδράσεις Bohr Η τόνωση του μεταβολισμού που πραγματοποιείται μέσω του CO2 από την αυξημένη παροχή οξυγόνου από τα ερυθρά κύτταρα του αίματος , αυξάνει τη μερική πίεση οξυγόνου εντός του ιστού. Το CO2 φτάνει εύκολα στα αιμοφόρα

	αγγεία του δέρματος, τήκεται στο αίμα και βοηθάει την αιμοσφαιρίνη να μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο στα κύτταρα.
Εφαρμογή	Μετά τον καθαρισμό του δέρματος, εφαρμόστε πριν από την κύλιση και τα 20 ml από το EZ CO2 Gel στο πρόσωπο. Εφαρμόστε το φύλλο της μάσκας σε όλη την επιφάνεια του προσώπου. Η εσωτερική διπλωμένη πλευρά (λεπτό υμένιο) της μάσκας θα πρέπει να εφάπτεται με το gel. Αφήστε το για 10 έως 20 λεπτά. Αφαιρέστε το gel επιμελώς.
Τip θεραπείας	Σε περίπτωση που χρειάζεται η χρήση τοπικής αναισθητικής κρέμας εφαρμόστε την μετά την αφαίρεση της EZ CO2 mask.
Φωτογραφία προϊόντος	

SRS Peeling

Είδος	Ορός
Κωδικός	GSPJCP01
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 2ml * 10 φιαλίδια
PH	3
Περιγραφή	Σύστημα αναζωογόνησης με αργής απελευθέρωσης AHA χωρίς εξουδετέρωση
Οφέλη	✓ Ελάχιστη αποφλοίωση 3 σύμπλοκο AHA ελεύθερων οξέων : απολέπιση, τόνωση των ινοβλαστών ✓ Επιτάχυνση κυτταρικής ανανέωσης ✓ Ενυδάτωση / ρύθμιση σμήγματος ✓ Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση μέσω του Φυτικού Οξέος: ενεργεί για να θεραπεύσει τη φλεγμονώδη βλάβη που προκαλείται από τα AHA. ✓ Λείανση επιδερμίδας ✓ Λεύκανση του δέρματος ✓ Σύσφιξη του δέρματος ✓ Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων ✓ Έλεγχος ακμής.
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Γλυκολικό οξύ (15%): Μόλις εφαρμοστεί στο δέρμα, το γλυκολικό οξύ διαπερνά το ανώτερο στρώμα της επιδερμίδας, αποδυναμώνοντας τους δεσμούς σύνδεσης των λιπιδίων που συγκρατούν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Αυξάνει τη διατήρηση υγρασίας, μέσω συγκράτησης νερού, (το οποίο απορροφάει από την κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας), με αποτέλεσμα την βελτίωση της ενδογενούς ενυδάτωσης του δέρματος και τη διέγερση παραγωγής κολλαγόνου μέσα στο χόριο. Γαλακτικό οξύ (15%) : Αυξάνει την αναπαραγωγή των κερατινοκυττάρων μέσω των κεραμιδίων και ενυδατώνει την κεράτινη στιβάδα του δέρματος, αποτρέπει την αφυδάτωση του, σχηματίζοντας ένα φράγμα πάνω από το ίδιο. Οι λευκαντικές του ιδιότητες βοηθούν στην επίτευξη ενός πιο ομοιόμορφου

	τόνου του δέρματος, μειώνοντας τις μικρές ατέλειες που εμφανίζονται από την εναπόθεση μελανίνης. Μαντελικό οξύ (2%) :παρέχει αντιφλεγμονώδεις, σμηγματορυθμιστικές, κερατολυτικές, αντι-βακτηριακές και ενυδατικές ιδιότητες. Φυτικό οξύ (2%) : έχει λευκαντική (δρά κατά της τυροσινάσης) και αντιοξειδωτική δράση. Η δράση των τριών AHAs καθιστά την κεράτινη στιβάδα πιο διαπερατή αυξάνοντας έτσι τη διείσδυση του Φυτικού Οξέος.
Εφαρμογή	Εφαρμοστε και τα 2ml της αμπούλας σε κάθε θεραπεία. Επιλογή 1 - Εφαρμόστε το στο δέρμα κάνοντας μασάζ για 20 λεπτά. Επιλογή 2 – Εφαρμόστε το στο δέρμα κάνοντας ταυτόχρονα κύλιση.
Τip θεραπείας	✓ Αναφερόμενο στη χρήση αναισθητικού προϊόντος Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μαζί με τα Genosys DTS Microneedling roller, αλλά συνιστάται να εφαρμόζεται χωρίς αναισθητική κρέμα. Κατά συνέπεια χρησιμοποιείται μαζί με το 0,25 mm ή 05 mm ρόλλερ που δεν απαιτεί κατ'ανάγκη το δέρμα τοπική αναισθησία. Εάν ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τα ιατρικά ρόλλερ (1,0 mm/1.5 mm / 2.0 χιλ.) εφαρμόζεται το SRS σύμφωνα με την Επιλογή 1 και αφήστε το για 20 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Έπειτα εφαρμόστε τη τοπική αναισθητική κρέμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε το ρόλλερ μετά από 30-60 λεπτά. Μετά την αφαίρεση της αναισθητικής κρέμας και πριν την έναρξη της κύλισης πρέπει να απολυπάνετε το δέρμα χρησιμοποιώντας προϊόν με 70%. ✓ Cocktail Για καλύτερο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση των ιστών, εφαρμόστε 2 ml από το CTS solution μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Προσοχή!Να μην αναμειγνύεται άμεσα το CTS solution με το SRS peeling. Για μεγαλύτερη προστασία και αναζωογόνηση του δέρματος, εφαρμόστε 2 ml από το CVS solution μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Προσοχή !Να μην αναμειγνύεται άμεσα το CVS solution με το SRS peeling. Στην περίπτωση ενός πολύ ευαίσθητου δέρματος, εφαρμόστε αρχικά 1 ml CTS ή CVS solution, στη συνέχεια εφαρμόστε 2 ml από το SRS peeling , και τελειώστε με 1 ml από το CTS ή CVS solution.
Φωτογραφία προϊόντος	  2ml * 10 Αμπούλες

ΕΝΕΡΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ορός - AWS Solution

Είδος	Ορός
Κωδικός	GAWJCA01
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια
PH	6.6
Περιγραφή	Αντιρυτιδικός και αντιγηραντικός ορός
Οφέλη	✓ Εξάλειψη λεπτών γραμμών και ρυτίδων ✓ Μείωση των ορατών σημάδιων της γήρανσης ✓ Προστασία ενάντια στα μελλοντικά σημάδια της γήρανσης ✓ Βελτίωση της σφριγηλότητας και ελαστικότητας του δέρματος ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά Συστατικά και Ιδιότητες	Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα κύτταρα. Αρβουτίνη : ισχυρός αναστολέας χρωστικής. Μειώνει δραστικά τη χρωστική στις γεροντικές κηλίδες και στις φακίδες και είναι από τους πιο ασφαλείς λευκαντικούς παράγοντες. Οι τρεις βασικές του δράσεις στο δέρμα είναι λεύκανση, αντιγήρανση και προστασία από τις ακτινοβολίες UVB/ UVC Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το μηχανισμό επούλωσης. Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική δράση. Αδενοσίνη: ενισχύει την αποκατάσταση και αναδόμηση του ιστού. Αντιφλεγμονώδη δράση Τριπεπτίδιο χαλκού -1: ισχυρός επουλωτικός παράγοντας. Διεγείρει τη παραγωγή κολλαγόνου στους ινοβλάστες, αυξάνει τη συσσώρευση των πρωτεϊνών, των γλυκοζαμινογλυκάνων και του DNA στις δερματικές πληγές. Ακετυλικό εξαπεπτίδιο -8: αντιρυτιδικός παράγοντας με μυοχαλαρωτική δράση
Εφαρμογή	Microneedling roller
Τip Θεραπείας	Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το AWS μπορεί να συνδυαστεί με το CTS (αναδόμηση ιστού) ή το CVS (αναζωογόνηση και προστασία)
Φωτογραφία προϊόντος	 2ml * 10 Φιαλίδια

Ορός - SWS Solution

Είδος	Ορός
Κωδικός	GSWJCA02
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια
PH	6.6
Περιγραφή	Ορός για τη λεύκανση και τον αποχρωματισμό του δέρματος
Οφέλη	✓ Δραστική βελτίωση του φωτογηρασμένου δέρματος ✓ Προστασία ενάντια στα μελλοντικά σημάδια της γήρανσης ✓ Αναζωογόνηση ✓ Εξάλειψη και αποχρωματισμός των γερωντικών κηλίδων ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά Συστατικά και Ιδιότητες	Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα κύτταρα. Αρβουτίνη : ισχυρός αναστολέας χρωστικής. Μειώνει δραστικά τη χρωστική στις γερωντικές κηλίδες και στις φακίδες και είναι από τους πιο ασφαλή λευκαντικούς παράγοντες. Οι τρεις βασικές του δράσεις στο δέρμα είναι λεύκανση, αντιγήρανση και προστασία από τις ακτινοβολίες UVB/ UVC Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το μηχανισμό επούλωσης. Aspergillus/Sacchromyces/Glyrrhiza uralensis root extract -ferment filtrate – λευκαντική δράση Εκχύλισμα γλυκόριζας – αναστέλλει τη χρωστική αποτρέποντας την ενεργοποίηση της τυροσινάσης. Αποτρέπει το μόνιμο αποχρωματισμό και διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Κοχικό οξύ – έχει αντίστοιχη δράση με την υδροκινόνη δίχως τις αρνητικές της παρενέργειες. Είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός λευκαντικός παράγοντας καθώς αναστέλλει τη παραγωγή μελανίνης. Scutellaria Baicalensis Root Extract – διαθέτει αντιμικροβιακές, αντιαλλεργικές, αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριδιακές, αντι-ιικές, ιδιότητες.
Εφαρμογή	Microneedling roller
Τύπος θεραπείας	Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το SWS μπορεί να συνδυαστεί με το CTS (αναδόμηση ιστού) ή το CVS (αναζωογόνηση και προστασία)
Φωτογραφία προϊόντος	 2ml * 10 φιαλίδια

Ορός - PCS Solution

Είδος	Ορός
Κωδικός	GPCJCA03
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια
PH	7.2
Περιγραφή	Ορός για το προβληματικό δέρμα
Οφέλη	✓ Επούλωση και πρόληψη νέων βλαβών ✓ Καταστολή της ακμής ✓ Ρύθμιση λιπαρότητας ✓ Καταπραύνση και καθαρισμός του δέρματος ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα κύτταρα. Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το μηχανισμό επούλωσης. Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική δράση. Pinus radiata bark extract: αντιοξειδωτική δράση Witch Hazel Extract: αντιφλεγμονώδη και καταπραυντική δράση Houttuynia cordata extract: προστατευτική δράση
Εφαρμογή	Microneedling roller
Τip θεραπείας	Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το PCS μπορεί να συνδυαστεί με το CTS (αναδόμηση ιστού) ή το CVS (αναζωογόνηση και προστασία)
Φωτογραφία προϊόντος	 2ml * 10 Φιαλίδια

Ορός - CTS Solution

Είδος	Ορός
Κωδικός	GCTJCA04
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια
PH	6.7
Περιγραφή	Ορός για την αναδόμηση του ιστού και την επούλωση του δέρματος
Οφέλη	✓ Βελτίωση των ουλών ακμής ✓ Βελτίωση των ουλών από έγκαυμα ✓ Ενδυνάμωση και βελτίωση της συνολικής υγείας του δέρματος ✓ Αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος ✓ Μείωση των ραβδώσεων ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα κύτταρα. Τριπεπτίδιο χαλκού -1: ισχυρός επουλωτικός παράγοντας. Διεγείρει τη παραγωγή κολλαγόνου στους ινοβλάστες, αυξάνει τη συσσώρευση των πρωτεϊνών, των γλυκοζαμινογλυκάνων και του DNA στις δερματικές πληγές. Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική δράση. Παλμιτικό τριπεπτίδιο-1: διεγείρει το κολλαγόνο και τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκάνων, συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής σφριγηλότητας του δέρματος, ενδυναμώνει τον συνδετικό ιστό και ενισχύει το μηχανισμό επούλωσης. Υαλουρονικό οξύ: αυξάνει την απαλότητα του δέρματος και μειώνει τις ρυτίδες. Δημιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος. . Παλμιτικό εξαπεπτίδιο -12: διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών και έχει συσφικτική δράση
Εφαρμογή	Microneedling roller
Τip θεραπείας	Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το CTS μπορεί να συνδυαστεί με το AWS/SWS/PCS .
Product Image	 2ml * 10 Φιαλίδια

Ορός - CVS Solution

Είδος	Ορός
Κωδικός	GCVJCA05

Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία : 2ml * 10 φιαλίδια
PH	6.1
Περιγραφή	Ορός για την αναζωογόνηση, ενυδάτωση και προστασία του δέρματος
Οφέλη	✓ Μαλακτικές, υγραντικές, ενυδατικές και θρεπτικές ιδιότητες ✓ Βελτίωση της ικανότητας συγκράτησης υγρασίας του δέρματος ✓ Προστασία ενάντια στην απώλεια υγρασίας ✓ Άμεση απορρόφηση και μη λιπαρή σύνθεση ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά Συστατικά και Ιδιότητες	Sh – πολυπεπτίδιο 7: ενεργοποιεί τα βλαστικά κύτταρα στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο τριχοθυλάκιο, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την τροφοδοσία της επιδερμίδας με νέα κύτταρα. Βοτανικό εκχύλισμα βλαστικών κυττάρων : προστατεύει από τη φλεγμονή και τον κνησμό. Παρέχει αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική και αντιοξειδωτική δράση. Υαλουρονικό οξύ: αυξάνει την απαλότητα του δέρματος και μειώνει τις ρυτίδες. Δημιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος. . Παλμιτικό εξαπεπτίδιο -12: διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών και έχει συσφικτική δράση Lactobacillus/Soymilk Ferment Filtrate – περιέχει πρωτεΐνες, αμινοξέα, λεκιθίνη, ισοφλαβονοειδή και γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA). Παρέχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. β-γλυκάνη: είναι μια διαλυτή ίνα που βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των πυρήνων βρώμης. Παρέχει άμεση ανακούφιση που τον κνησμό που σχετίζεται με τον ερεθισμό του δέρματος. Βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος, μειώνει τις ουλές και ενισχύει τη διαδικασία επούλωσης. Αλλαντοΐνη: διαθέτει αντι-ερεθιστικές και προστατευτικές ιδιότητες
Εφαρμογή	Microneedling roller
Τip θεραπείας	Για την ενίσχυση και επιτάχυνση του αποτελέσματος το CVS μπορεί να συνδυαστεί με το AWS/SWS/PCS
Φωτογραφία προϊόντος	 2ml * 10 Φιαλίδια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Post needling Μάσκα - PHG Mask

Είδος	Μάσκα
Κωδικός	GGMJCM03
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 5 θεραπείες(5 τεμάχια)
PH	5.5
Περιγραφή	PHG(Peptide Hydro Gel Mask) είναι ένα προϊόν που αναπτύχθηκε για ιατρική χρήση, το οποίο καταπραΰνει και ενυδατώνει το δέρμα μετά από διάφορες δερματολογικές θεραπείες όπως microneedling ή επεμβατικά λέιζερ.
Οφέλη	✓ Ευαίσθητο θερμοκρασίας PHG μάσκα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα να αποκτά τη θερμοκρασία του σώματος και σταδιακά να ενεργοποιεί το τζελ της μάσκας. Το δέρμα αισθάνεται άμεσα την αίσθηση δροσιάς λόγω της θερμότητα που εκτοπίζεται από την εξάτμιση της υγρασίας από τη μάσκα. Το δέρμα απορροφά μέρος της υγρασίας, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την ικανότητα του δέρματος να απορροφά τα ενεργά συστατικά. ✓ Θεραπευτική δράση Άμεση καταπράυνση του δέρματος λόγω του χαμομηλιού και αποτελεσματική αναζωογόνηση λόγω των πεπτιδίων και του κολλαγόνου. ✓ Ενυδατική δράση Συγκρατεί 7 φορές περισσότερο νερό από τον καθαρισμό του προσώπου και 3 φορές περισσότερο από μια ενυδατική κρέμα (30% νερό) ✓ Καταπράυνση - αίσθηση δροσιάς Υπάρχει μια αίσθηση δροσιάς όταν η θερμότητα του δέρματος μειώνεται καθώς το νερό εξατμίζεται από τη μάσκα. Το αίσθημα δροσιάς είναι μεγαλύτερο όταν ο ρυθμός ενυδάτωσης είναι μεγαλύτερος. Η θερμοκρασία του δέρματος μειώνεται αμέσως μετά την εφαρμογή της μάσκας. Χρειάζονται τουλάχιστον 60 λεπτά για να αποκατασταθεί η θερμοκρασία του δέρματος. ✓ Θρέψη PHG Μάσκα αυξάνει την επιδερμική ποσότητα νερού και απομακρίνει την περίσσεια σμήγματος από την επιδερμίδα. Η επιδερμίδα αποκτά πιο ελαστική και λαμπερή όψη. Η διαδερμική παροχή νερού και των δραστικών συστατικών στο δέρμα βελτιώνει την συνολική εμφάνιση του.
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	Ακετυλικό Εξαπεπτίδιο-3: Χαλαρώνει την ένταση των μυών του προσώπου με αποτέλεσμα να μειώνει της λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Χαμομήλι: αντι-αλλεργικές και αντιφλεγμονώδη ιδιότητες. Υαλουρονικό Οξύ: ενισχύει την ενδογενή υγρασία, μειώνει λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος. Βιταμίνη Κ: ενισχύει την ταχεία επούλωση του δέρματος. Αρνικά: προάγει την επούλωση των ιστών, μειώνει το οίδημα και τη φλεγμονή
Εφαρμογή	Εφαρμόστε τη στο δέρμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κύλισης. Αφήστε τη για 20 λεπτά.
Tip θεραπείας	Συνιστάται η χρήση και στο σπίτι κάθε βράδυ για εντατική ενυδάτωση καθώς μετά τη θεραπεία με το microneedling, το δέρμα τείνει να είναι ξηρό. Όταν το δέρμα είναι καλά ενυδατωμένο, η διαδικασία επούλωσης επιταχύνεται.
Φωτογραφία προϊόντος	



SRP Cream - Κρέμα αποκατάστασης

Είδος	Κρέμα
Κωδικός	GSRC08
Μέγεθος	Επαγγελματική και λιανική συσκευασία:20ml
PH	5.9
Περιγραφή	Κρέμα αποκατάστασης μετά από επεμβατικές ιατρικές και αισθητικές θεραπείες
Οφέλη	✓ Βοηθά στη γρήγορη αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιστών του δέρματος. ✓ Εξαιρετικό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της φλεγμονής και στην αντι-οξειδωση ✓ Μειώνει τον ερεθισμό,ερυθρότητα, ερύθημα και οίδημα μετά από ιατρικές θεραπείες. ✓ Εξαιρετική καταπραϋντική επίδραση των συστατικών στο δέρμα ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	SH-Πολυπεπτίδιο-7: ενεργοποιεί τα βλαστοκύτταρα που εντοπίζονται στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και στο θύλακα της τρίχας. Υαλουρονικό Οξύ: αυξάνει την ενυδάτωση και μειώνει τις ρυτίδες. Προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων κυττάρων και για την επούλωση του δέρματος. Β-γλυκάνη : μια διαλυτή ίνα η οποία βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των πυρήνων της βρώμης. Προάγει την επούλωση των πληγών και τη μείωση του κνησμού και του πόνου. Centella Asiatica Extract : αντι-γήραντικές και επουλωτικές ιδιότητες Γλυκορριζικό Κάλιο: προέρχεται από τη ρίζα γλυκόριζας. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση που αναστέλλει την απελευθέρωση της ισταμίνης, ενώ η επιβράδυνση του αραχιδονικού οξέος μειώνει τη φλεγμονή. Έκχύλισμα ρίζας Scutellaria baicalensis : Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιμυκητιακές ιδιότητες.
Εφαρμογή	Εφαρμόστε τη στο δέρμα μετά την αφαίρεση της PHG mask.
Tip θεραπείας	Επαγγελματική θεραπεία Σε περίπτωση έντονου ερεθισμού μπορείται να εφαρμόσετε τη SRP Cream πριν από την PHG mask.

	Θεραπεία στο σπίτι Συνιστάται η χρήση της τα 2 πρώτα 24ωρα μετά τη θεραπεία
Φωτογραφία προϊόντος	

ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Χρονική διάρκεια :50 λεπτά

Η συχνότητα και ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτώνται από το μήκος της βελόνας που θα χρησιμοποιήσουμε.

Χρήση 0.50 mm 1 φορά ανά 10 ημέρες για 3 έως 10 συνεδρίες

1.0 mm 1 φορά ανά 2 εβδομάδες για 3 έως 10 συνεδρίες

1.5 mm 1 φορά ανά 3 εβδομάδες

Για την συντήρηση μπορείται να χορηγείσεται ένα πρόγραμμα οικιακής περιποίησης (προϊόντων + roller 0.25 mm) μαζί με τις θεραπείες.

Το πακέτο των θεραπειών μπορεί να επαναληφθεί μέχρι δύο φορές τον χρόνο.

ΒΗΜΑ 1° ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με CLEANSING SNOW O2 για να προετοιμάσετε το δέρμα για τη θεραπεία. Εφαρμόστε σε στεγνό δέρμα μια ομοιόμορφη στρώση εκτός από τα μάτια και το στόμα. Περιμένετε για 1 λεπτό μέχρι να δημιουργηθεί πλήρως ο αφρός. Κάνετε ελεφρύ μασάζ στη περιοχή του προσώπου και ξεπλένετε με χλιαρό νερό . Αν χρειάζεται επαναλάβετε τη διαδικασία. Αφαιρεί αποτελεσματικά το μακιγιάζ, τις λιπαρές εκκρίσεις και τους ρύπους.

ΒΗΜΑ 2° ΤΟΝΩΣΗ

Εφαρμόστε το SNOW BOOSTER σε μία γάζα και εφαρμόστε το στο δέρμα με μία ελαφριά τριβή. Έτσι αφαιρούνται τα τελευταία ίχνη μακιγιάζ και λιπαρότητας. Έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και προετοιμάζει το δέρμα για την βέλτιστη διείσδυση των προϊόντων της ενεργής θεραπείας.

ΒΗΜΑ 3° ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ

Εφαρμόστε το Prepping Solution, σκουπίστε πολύ καλά με την εμποτισμένη γάζα την περιοχή περιποίησης ώστε να αφαιρέσετε κάθε ίχνος λιπαρότητας αλλά και να την αποστειρώσετε.

ΒΗΜΑ 4° ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εφαρμόστε τη EZ CO2 MASK σύμφωνα με τις οδηγίες. Αφήστε τη για 5 λεπτά και αφαιρέστε τη πολύ καλά με βρεγμένη γάζα. Σε αυτό το στάδιο προετοιμάζεται το δέρμα, χωρίς να υπερδιεγείρεται ή να ερεθίζεται για τη καλύτερη διείσδυση του SRS PEELING.

ΒΗΜΑ 5° ΕΝΕΡΓΟ ΠΗΛINK

Εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο στρώμα από το SRS PEELING στο δέρμα με στεγνό καθαρό πινέλο. Αφήστε το στο δέρμα για 20 λεπτά. Δεν εξουδετερώνεται και δεν αφαιρείται.

Το SRS PEELING διευκολύνει προοδευτικά την απολεπίση των νεκρών κυττάρων της επιδερμίδας και τη διείσδυση στο χόριο που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση δομικού

κολλαγόνου στο χόριο.

ΒΗΜΑ 6° ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Κατά την πρώτη θεραπεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το αποστειρωμένο roller. Στις επόμενες όμως θεραπείες πρέπει να το αποστειρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο **ΠΡΙΝ** και **ΜΕΤΑ** από κάθε θεραπεία. Αδειάστε περίπου 25ml Nimue Sterilising Solution σε ένα στεγνό και καθαρό μπόλ. Τοποθετήστε ένα νέο κομμάτι διπλωμένης γάζας στο πάτο του μπόλ έτσι ώστε να βυθιστεί στο διάλυμα. Ολισθήστε το roller επανειλημμένα (τουλάχιστον 10 φορές ανά πλευρά) πάνω από τη γάζα στο Nimue Sterilising Solution. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα γάζας στο roller. Αφήστε το roller στο διάλυμα για τουλάχιστον 10 λεπτά. Βγάλτε το από το διάλυμα και σκουπίστε το μαλακά με μια καθαρή γάζα. Το roller πλέον είναι έτοιμο για χρήση. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αποστείρωσης ΠΡΙΝ από την επόμενη θεραπεία.

ΒΗΜΑ 7° MICRONEEDLING.

Εφαρμόστε το roller με ίση πίεση σε όλες τις περιοχές. Ξεκινάτε να δημιουργήσετε ένα σταυρό. Δουλεύετε πρώτα με κάθετες και μετά με οριζόντιες κινήσεις. Συνεχίστε με πλάγιες κινήσεις για να σχηματίσετε ένα Χ . Περάστε το roller πάνω από κάθε περιοχή 3 φορές. Μια κίνηση μπροστά και μία κίνηση πίσω θεωρείται ως ένα πέρασμα. Ανάμεσα από τα περάσματα εφαρμόζοντε οι οροί.

ΒΗΜΑ 8° ΟΡΟΙ

Εφαρμόστε τους ορούς στην περιοχή περιποίησης κατά τη διάρκεια των περασμάτων. Μόλις ολοκληρώσετε το πρώτο πέρασμα (σχηματισμός σταυρού) χρησιμοποιήστε το μισό διάλυμα στο δέρμα σε μικρές ποσότητες. Ενδείκνυται η χρήση σταγονόμετρου.Κάνετε ελαφρύ μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. Όταν ολοκληρώσετε και το δεύτερο πέρασμα (σχηματισμός Χ) ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το υπόλοιπο διάλυμα.

ΟΡΟΙ : 1.AWS 2ml (ενδεικτικά)
2.CVS 2 ml (ενδεικτικά)

Πληροφορίες για τη σύσταση των ορών θα βρείτε στον αναλυτικό κατάλογο της rhaceMED.

Η συνεργική δράση των αυξητικών παραγόντων με τα πεπτιδικά συμβάλλει στη μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, στη μείωση των ορατών σημάδιων της γήρανσης, στην προστασία του δέρματος από μελλοντική γήρανση και στη βελτίωση της ελαστικότητας και του τόνου του δέρματος.

ΒΗΜΑ 9° ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ

Εφαρμόστε την PEPTIDE Mask σύμφωνα με τις οδηγίες απευθείας στο δέρμα. Αφήστε τη για 10 με 20 λεπτά. Αφαιρέστε προσεκτικά.

Αυτό το βήμα θα δροσίσει, θα καταπρύνει, θα ενυδατώσει και θα ανανεώσει το δέρμα. Δυναμώνει τη δομή των δεσμών των ινών κολλαγόνου και ενισχύει έτσι την ανθεκτικότητα και την ελαστικότητα.

ΒΗΜΑ 10° ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Εφαρμόστε τη SRP CREAM προκειμένου να ενυδατώσετε και να ανακουφίσετε το δέρμα. Αποτρέπει την επιδερμική απώλεια νερού και χαρίζει όγκο. Βοηθάει στην αποκατάσταση του δέρματος μετά από τη θεραπεία με το ρόλλερ και έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδοτικές ιδιότητες. Ακόμα σε αυτό το βήμα μέσω της όσμωσης ενισχύετε την διείσδυση των ενεργών συστατικών.

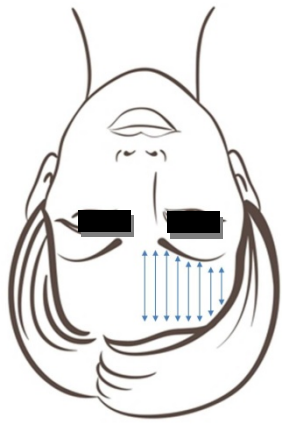
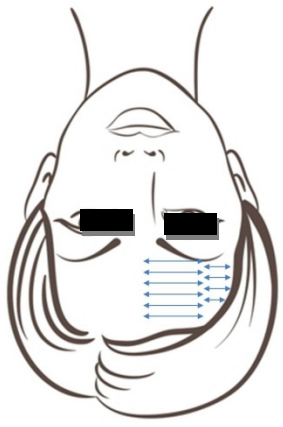
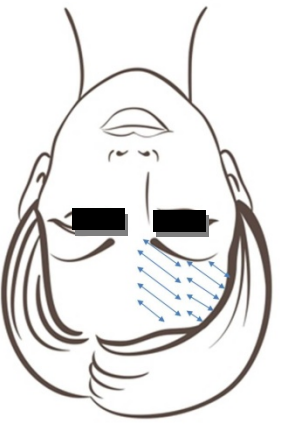
ΒΗΜΑ 13° ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιμένετε 15 λεπτά και εφαρμόστε το SPF 20.







Ενδείκνυται η οικιακή χρήση του DTS body roller 0.25 mm καθώς αυξάνει την απορρόφηση και μεγιστοποιεί τη δράση των καλλυντικών προϊόντων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ

- Ο ασθενής θα πρέπει να έχει κλειστά μάτια καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίας.
- Απολυμάνετε το δέρμα πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή του roller. Χρησιμοποιείτε **πάντα** γάντια.
- Απολυμάνετε το roller πριν και μετά από κάθε συνεδρία σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δωθεί.
- Μία κύλιση μπροστά πίσω και πάλι μπροστά είναι ένα πέρασμα. Μην ξεπεράσετε τις 3 κινήσεις σε κάθε περιοχή.
- Δεν επιτρέπονται ζικ-ζακ κινήσεις. Απομακρύνετε πρώτα το roller από το δέρμα για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή.
- Τεντώστε την περιοχή που θα εφαρμόσετε το roller και κυλίστε αργά.
- Τα ενεργά διαλύμματα μπορούν να εφαρμοστούν πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή και κατά τη διάρκειά της (ανάμεσα στα δύο στάδια).
- Η εφαρμογή του roller γίνεται σε 2 στάδια. Το 1^ο στάδιο περιλαμβάνει τις κάθετες και τις οριζόντιες κινήσεις ενώ το 2^ο στάδιο τις διαγώνιες.
- Αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, το δέρμα αιμοραγεί, πιέστε ελαφριά με αποστειρωμένη γάζα και απομακρύνετε το αίμα, έτσι ώστε η πήξη του να μην εμποδίσει την διείσδυση των ενεργών συστατικών.
- Προσοχή στις αντενδείξεις!

		
Τεντώστε το μέτωπο και ξεκινήστε την κύλιση στο δεξί μισό του μετώπου με κάθετες κινήσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί ελαφριά πίεση. Σημειώστε ότι αυτή η περιοχή είναι αρκετά ευαίσθητη και ο ασθενής μπορεί να νιώσει πολύ εύκολα πόνο.	Τεντώστε το μέτωπο και συνεχίστε τη κύλιση με οριζόντιες κινήσεις.	Τεντώστε το μέτωπο και ολοκληρώνετε τη δεξιά πλευρά του μετώπου με διαγώνιες κινήσεις.

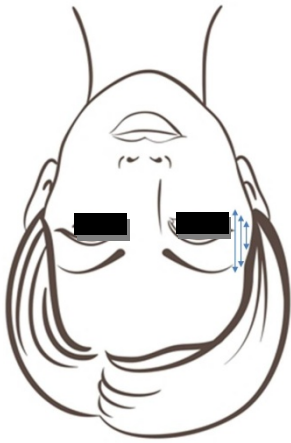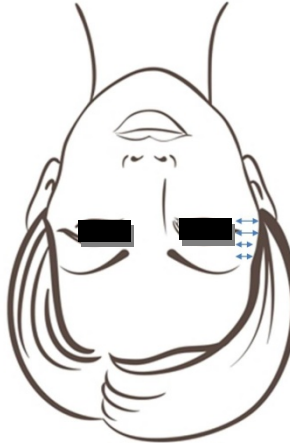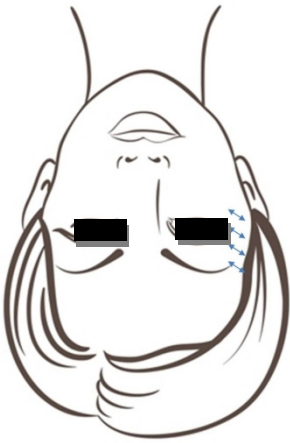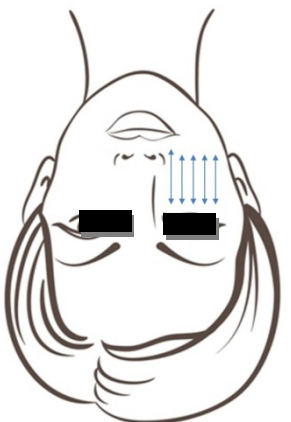
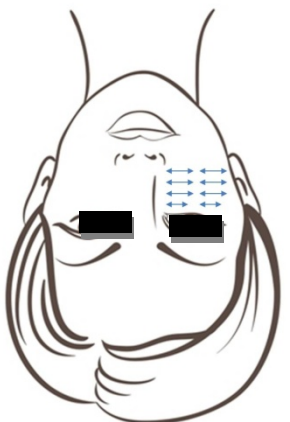
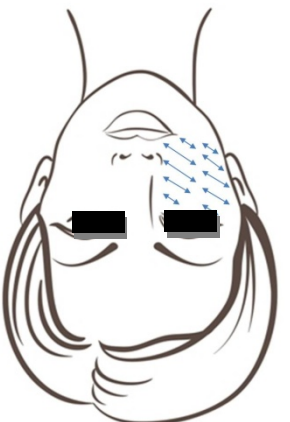
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ

		
Τεντώστε το κρόταφο και κυλίστε το roller κάθετα. Εφαρμόστε το με ιδιαίτερη προσοχή κοντά στη περιοχή των ματιών.	Τεντώστε το κρόταφο και κυλίστε το roller οριζόντια. Ασκήστε ελαφριά πίεση κυρίως στον έξω κανθό (πόδι χήνας). Αποφύγετε την οποιαδήποτε πίεση κοντά στον έσω κανθό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα ατυχήματος.	Τεντώστε το κρόταφο και ολοκληρώστε την κύλιση με διαγώνιες κινήσεις.
		
Εφαρμόστε το roller με κάθετες κινήσεις στην δεξιά παρειά.	Συνεχίστε την κύλιση με οριζόντιες κινήσεις.	Ολοκληρώστε την κύλιση με διαγώνιες κινήσεις.




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ

		
Εφαρμόστε το roller στο πηγούνι και στο περίγραμμα της κάτω γνάθου με κάθετες κινήσεις αφού πρώτα έχετε τεντώσει την περιοχή. Ζητήστε από τον ασθενή να φουσκώσει τα μάγουλά του αν χρειάζεται να επιμείνετε στο περίγραμμα του προσώπου.	Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και συνεχίστε την κύλιση με οριζόντιες κινήσεις.	Ολοκληρώνετε με διαγώνιες κινήσεις την περιοχή του πηγουνιού.
		
Για να εφαρμόσετε το roller στο άνω χείλος ζητήστε από τον ασθενή να τοποθετήσει τη γλώσσα του ανάμεσα στο άνω χείλος και τα δόντια του. Ξεκινήστε με οριζόντιες κινήσεις	Συνεχίστε την ίδια ακριβώς διαδικασία κάνοντας διαγώνιες κινήσεις αυτή τη φορά.	Ζητήστε από τον ασθενή να ανασηκώσει το πηγούνι προκειμένου να εφαρμόσετε το roller στην περιοχή του λαιμού. Δεν ασκήτε καθόλου πίεση. Τεντώστε καλά την περιοχή.

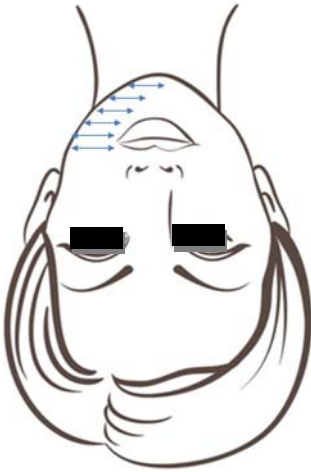
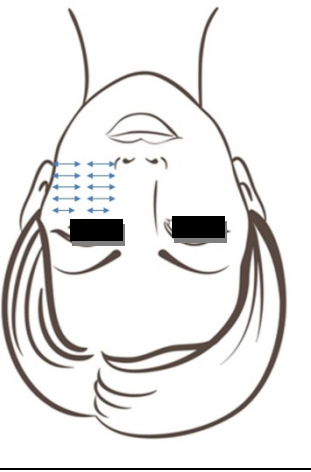
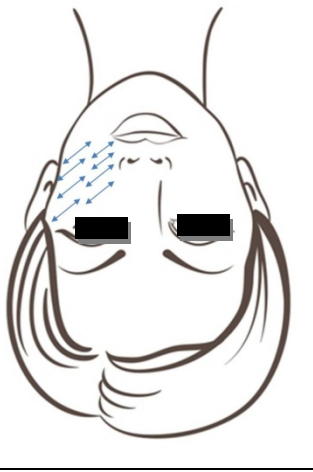
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ

		
Εφαρμόστε το roller στην αριστερή πλευρά του πηγουνιού και στο περίγραμμα της κάτω γνάθου με κάθετες κινήσεις αφού πρώτα έχετε τεντώσει την περιοχή. Ζητήστε από τον ασθενή να φουσκώσει τα μάγουλά του αν χρειάζεται να επιμείνετε στο περίγραμμα του προσώπου.	Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και συνεχίστε την κύλιση με οριζόντιες κινήσεις.	Ολοκληρώνετε την κύλιση με διαγώνιες κινήσεις την αριστερή πλευρά του πηγουνιού.
		
Εφαρμόστε το roller με κάθετες κινήσεις στην αριστερή παρειά.	Συνεχίστε την κύλιση με οριζόντιες κινήσεις.	Ολοκληρώστε την κύλιση με διαγώνιες κινήσεις.

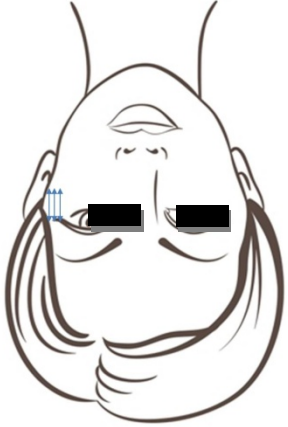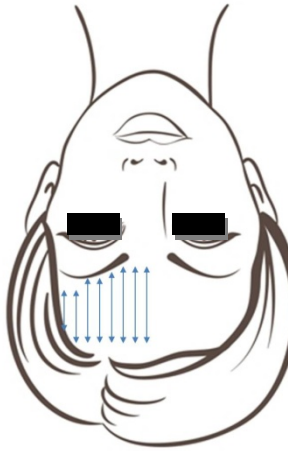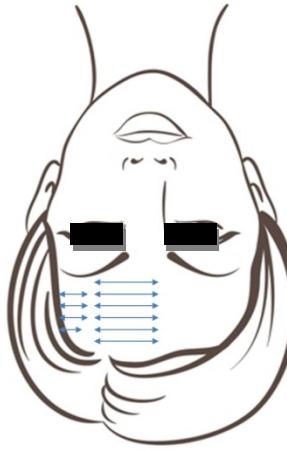ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ

		
Τεντώστε το κρόταφο και κυλίστε το roller κάθετα. Εφαρμόστε το με ιδιαίτερη προσοχή κοντά στη περιοχή των ματιών.	Τεντώστε το κρόταφο και κυλίστε το roller οριζόντια. Ασκείστε ελαφριά πίεση κυρίως στον έξω κανθό (πόδι χήνας). Αποφύγετε την οποιαδήποτε πίεση κοντά στον έσω κανθό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα ατυχήματος.	Τεντώστε το κρόταφο και ολοκληρώστε την κύλιση με διαγώνιες κινήσεις.
		
Τεντώστε το μέτωπο και ξεκινήστε την κύλιση στο μισό αριστερό του μετώπου με κάθετες κινήσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί ελαφριά πίεση. Σημειώστε ότι αυτή η περιοχή είναι αρκετά ευαίσθητη και ο ασθενής μπορεί να νιώσει πολύ εύκολα πόνο.	Τεντώστε το μέτωπο και συνεχίστε τη κύλιση με οριζόντιες κινήσεις.	Τεντώστε το μέτωπο και ολοκληρώνετε την αριστερή πλευρά του μετώπου με διαγώνιες κινήσεις.

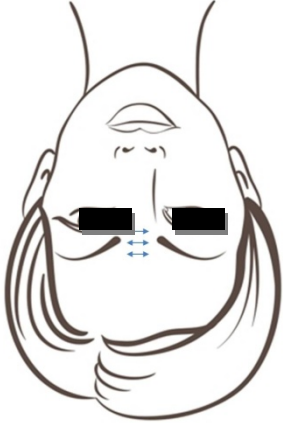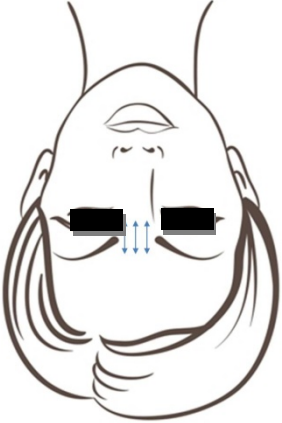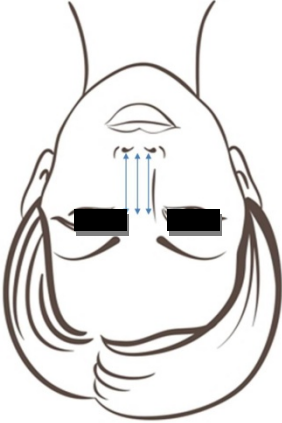ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΠΡΟΣΩΠΟΥ

		
Τεντώστε την περιοχή του μεσόφρουου και κυλίστε με οριζόντιες κινήσει το roller.	Συνεχίζετε την ίδια διαδικασία κάνοντας κάθετες κινήσεις.	Εφαρμόστε το roller στην μύτη με κάθετες κινήσεις χωρίς να ασκήσετε καθόλου πίεση. Εδώ ολοκληρώνεται η θεραπεία.

- Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της κύλισης εφαρμόστε τη μάσκα σύμφωνα με το πρωτόκολλο για καταπραύνετε και να ενυδατώσετε την περιοχή του προσώπου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ



EYECELL Eye Contour Serum – Ορός ματιών

Είδος	Ορός
Κωδικός	GESS04
Μέγεθος	Επαγγελματική και λιανικής συσκευασία: 10 ml
PH	5.9
Περιγραφή	Ορός ματιών για τη βελτίωση των ρυτίδων, μαύρων κύκλων και σακούλων κάτω από τα μάτια.
Οφέλη	✓ Ισχυρή φόρμουλα που ενισχύει τα αποτελέσματα του eye roller . ✓ Μειώνει τις βαθιές ρυτίδες και μαύρους κύκλους, ενισχύει τη σύσφιξη του άνω βλεφάρου.
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Παλμιτικό Εξαπεπτιδίο-12 : Διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών, προκαλώντας έντονη σύσφιξη. Τριπεπτιδίο Χαλκού-1: επουλωτικός παράγοντας του τραύματος. Διεγείρει τη σύνθεση του κολλαγόνου, αυξάνει τις γλυκοζαμινογλυκάνες . Ακετυλικό Εξαπεπτιδίο-8 : μειώνει τις ρυτίδες καθώς χαλαρώνει τους μύες. Anti dark circle complex (NHS, chrysin, 2 palmitoyl peptides): μειώνει την εναπόθεση χρωστικής και βοηθάει στην αναδιάρθρωση των εύθραυστων συνδετικών ιστών γύρω από τα μάτια. Έχει αντι-φλεγμονώδη δράση που συμβάλλει στη μείωση της αγγειοδιαστολής . Μειώνει σημαντικά το βιολετί χρώμα των κύκλων κάτω από τα μάτια. Εκχύλισμα φυτικών βλαστικών κυττάρων: αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Μειώνει το αίσθημα κνησμού.
Εφαρμογή	Εφαρμόστε τον ορό σε όλη την υπο θεραπεία περιοχή του ματιού πριν την κύλιση.
Τip θεραπείας	Κάντε απαλό μασάζ για να απλωθεί ομοιόμορφα ο ορός πριν από την έναρξη της κύλισης. Μην κάνετε κύλιση κάτω από τα μάτια ασκώντας πίεση. Η κύλιση στη περιοχή των ματιών θα πρέπει να γίνεται σιγά-σιγά και απαλά. Μια μικρή πίεση μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως στο πόδι της χήνας. Μην κάνετε κύλιση στα βλέφαρα (ακριβώς πάνω από τα μάτια). Η διάρκεια κύλισης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3-5 λεπτά σε κάθε πλευρά.

Φωτογραφία Προϊόντος	
----------------------	--

EYECCELL Eye Contour Cream – Κρέμα ματιών




Είδος	Κρέμα
Κωδικός	GECC09
Μέγεθος	Επαγγελματική και λιανικής συσκευασία: 20 ml
PH	6.3
Περιγραφή	Κρέμα ματιών για τη βελτίωση των ρυτίδων, μαύρων κύκλων και σακούλων κάτω από τα μάτια.
Οφέλη	Μειώνει αισθητά την εμφάνιση των ρυτίδων στο πόδι της χήνας, τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους.
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Παλμιτικό Εξαπεπτίδιο-12 :Διεγείρει την ανάπτυξη των ινοβλαστών, προκαλώντας συσφικτική δράση. Τριπεπτίδιο Χαλκού-1: επουλωτικός παράγοντας του τραύματος. Διεγείρει τη σύνθεση του κολλαγόνου, αυξάνει τις γλυκοζαμινογλυκάνες . Ακετυλικό Εξαπεπτίδιο-8 : μειώνει τις ρυτίδες καθώς χαλαρώνει τους μύες. Anti dark circle complex (NHS, chrysin, 2 palmitoyl peptides) :μειώνει την εναπόθεση χρωστικής και βοηθάει στην αναδιάρθρωση των εύθραυστων συνδετικών ιστών γύρω από τα μάτια. Έχει αντι-φλεγμονώδη δράση που συμβάλλει στη μείωση της αγγειοδιαστολής . Μειώνει σημαντικά το βιολετί χρώμα των κύκλων κάτω από τα μάτια. Εκχύλισμα φυτικών βλαστικών κυττάρων : αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Μειώνει το αίσθημα κνησμού.
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία Εφαρμόστε τη μετά από την αφαίρεση της EGP mask. Θεραπεία στο σπίτι Συνιστάται η χρήση της ως κρέμα ημέρα και νυχτός για τη περιοχή των ματιών.
Φωτογραφία προϊόντος	

EYECCELL Eye Gel Patch – Φύλλα ματιών

Είδος	Μάσκα
Κωδικός	GERM04
Μέγεθος	Επαγγελματική και λιανικής συσκευασία:60 τεμάχια – 30 εφαρμογές
PH	6.4
Περιγραφή	Εξειδικευμένα gel patches για τη περιοχή των ματιών που καταπραύνουν και βελτιώνουν τις ρυτίδες και τις σακούλες των ματιών.
Οφέλη	✓ Καταπραύνουν και ενυδατώνουν το δέρμα μετά από ιατρικές και αισθητικές θεραπείες. ✓ Βελτιώνουν την εμφάνιση της περιοχής των ματιών.
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Lavandula Angustifolia (Λεβάντα) :καταπραύνει το δέρμα Mentha Piperita (Μέντα) : αφήνει το δέρμα φρέσκο Rosmarinus Officinalis (Δενδρολίβανο): αναζωογόνηση δέρματος Chamomilla Recutita (Χαμομύλι):μειώνει την απώλεια υγρασίας από το δέρμα Glycyrrhiza Glaba (Γλυκόριζα): εμποδίζει την ενεργοποίηση της τυροσινάσης. Αποτρέπει τον μόνιμο χρωματισμό και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Sesamum Indicum (Σουσάμι): αντιοξειδωτικό Sophora Angustifolia Root Extract: μείωση λοίμωξης Scutellaria baicalensis: Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιμυκητιακές ιδιότητες. Αλλαντοΐνη: μειώνει τον ερεθισμό Β-γλυκάνη : μια διαλυτή ίνα η οποία βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των πυρήνων της βρώμης. Προάγει την επούλωση των πληγών και τη μείωση του κνησμού και του πόνου. Αρβουτίνη: αναστολέας χρωστικής. Μειώνει τη μελάγχρωση του δέρματος ιδιαίτερα των κηλίδες και φακίδων. Πρόκειται για το ασφαλέστερο συστατικό λεύκανση του δέρματος. Οι 3 κύριες επιδράσεις του στο δέρμα είναι η λεύκανση, η αντι-γήρανση και η αντηλιακή προστασία (UVB / UVC φίλτρα) Αδενοσίνη: Ενισχύει την αποκατάσταση του συνδετικού ιστού. Επιπλέον έχει αντιφλεγμονώδη δράση
Εφαρμογή	Εφαρμόστε τα eye patches μετά την ολοκλήρωση της κύλισης.
Τip θεραπείας	Συνιστάται η χρήση και στο άνω βλέφαρο σε περίπτωση έντονου ερεθισμού.
Φωτογραφία προϊόντος	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EYECCELL ROLLER

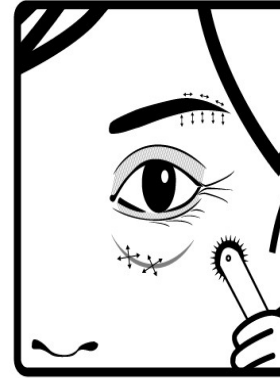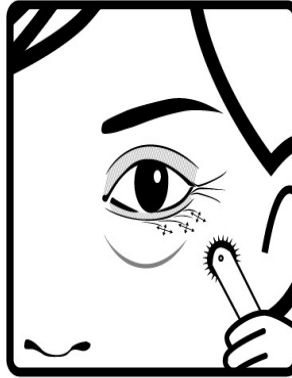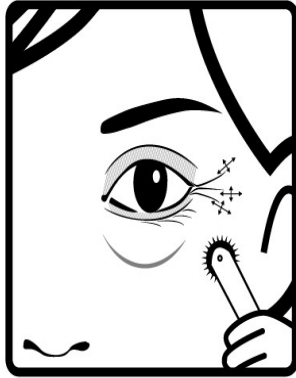- Μόνο το 0.25 mm Eye roller μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στη περιοχή των ματιών.
- Ο ασθενής θα πρέπει να έχει πάντα τα μάτια του κλειστά.



Τεντώστε το πόδι της χήνας και εφαρμόστε το roller με ελαφριά πίεση. Αποφυγέτε τελείως την εφαρμογή του στην περιοχή του κινητού βλεφάρου και όπου δεν υπάρχει οστό.

Κυλίστε το roller σας κάτω από την περιοχή των ματιών χωρίς να ασκήσετε καθόλου πίεση ακολουθώντας την κατεύθυνση των ρυτίδων. Συνεχίστε την κύλιση κατά μήκος αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση των ρυτίδων.

Για τις σακούλες κάτω από τα μάτια εφαρμόστε το eye roller και προς τις 2 κατευθύνσεις, κάθετα και οριζόντια. Στην περιοχή των φρυδιών μπορείτε να το εφαρμόσετε ,έχοντας σαν οδηγό το οστό, ως πρόληψη στην πτώση του άνω βλεφάρου .

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ



Clinical Scalp Peeling – Πήλινκ για το τριχωτό κεφαλής

Είδος	Peeling
Κωδικός	GSPJCP01
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 100ml
PH	3.5
Περιγραφή	Ελαφρύ peeling για το τριχωτό της κεφαλής. Απολυμαίνει την υπο θεραπεία περιοχή και αναζωογονεί το τριχωτό της κεφαλής πριν από την κύλιση.
Οφέλη	✓ Αίσθηση δροσιάς ✓ Απολύμανση και απολύπανση της υπο θεραπείας περιοχής ✓ Αντιφλεγμονώδη δράση ✓ Καθαρισμός
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Σαλικυλικό οξύ: Αφαιρεί τα υπολείμματα του σμήγματος, αποφράζει το θύλακα, καταπραΰνει τη φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής και προλαμβάνει την φαγούρα Μενθόλη: αίσθηση φρεσκάδας και αντιφλεγμονώδη δράση Sophora japonica : Αναστέλλει την παραγωγή DHT Πράσινο τσάι : Τονώνει την ευελιξία των μικροαγγείων, αναγεννά τους ιστούς του δέρματος Έλαιο σπόρου γκρέιπφρουτ: αντιοξειφωτική και ενυδατική δράση
Εφαρμογή	Εφαρμόστε το Clinical Hair Shampoo στο τριχωτό. Στεγνώστε τα μαλλιά. Τοποθετήστε 5ml από το Clinical Scalp Peeling στο γυάλινο κύλινδρο που περιέχεται στο κιτ. Εμποτίστε αρκετά τη μπατονέτα και εφαρμόστε τη ασκώντας τριβή σε όλη την υπο θεραπεία περιοχή.
Φωτογραφία προϊόντος	

Clinical Hair Solution – Ορός για το τριχωτό κεφαλής

Είδος	Ορός
Κωδικός	GHSJCS02
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία : 5ml * 8 φιαλίδια Μέσα στο HR3 Matrix Kit : 5ml * 6 φιαλίδια
PH	6.5
Περιγραφή	Εξαιρετικά συμπυκνωμένο διάλυμα που εμποδίζει και αναστέλλει την τριχόπτωση
Οφέλη	✓ Αναστέλλει την αιτία της απώλειας μαλλιών ✓ Παρέχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά στους θύλακες των τριχών καθώς ενισχύει την αγγειογένεση. ✓ Ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Sophora japonica : αναστέλλει την παραγωγή DHT Εξαπεπεπτίδιο 33 : αγγειογένεση Πεπτίδιο Χαλκού : αναστολή της DHT, ενεργοποίηση της ECM Portulacae Herba, Polygonum multiflorum, Angelica gigantis Radix, Asarum sieboldii, Sophora flavescens Ait., Thuja orientalis, Lycium chinense, ginkgo leaf, Carthamus tinctorius L., Πράσινο τσάι, Ρόδι: σύμπλοκο που επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος, αναζωογονεί τα μικροαγγεία, παρέχει τα θρεπτικά συστατικά στους θύλακες Grapefruit seed oil: αντιοξειδωτική και ενυδατική δράση. Νιασιναμίδιο: Προλαμβάνει τα προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής, επιταχύνει την μικρο-κυκλοφορία, ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος. Πανθενόλη : ενυδατική και καταπραυντική δράση.
Εφαρμογή	Εφαρμόστε το μετά από το Clinical Scalp Peeling και κατά τη διάρκεια της κύλισης
Φωτογραφία προϊόντος	

Clinical Hair Tonic – Λοσιόν για το τριχωτό κεφαλής

Είδος	Λοσιόν
Κωδικός	CHRJCT02
Μέγεθος	Συσκευασία λιανικής: 70 ml
PH	3.5
Περιγραφή	Εξειδικευμένη λοσιόν για τη θεραπεία αλωπεκίας στο σπίτι
Οφέλη	✓ Αντι-φλεγμονώδη ✓ Καταπραϋντική ✓ Αντιβακτηριακή ✓ Αναζωογονητική δράση
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Σαλικυλικό οξύ : Αφαιρεί τα υπολείμματα σμήγματος, αποφράζει τους θύλακες, καταπραϋνει τη φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής και προλαμβάνει την φαγούρα. Μενθόλη: αίσθηση φρεσκάδας και αντι-φλεγμονώδης δράση Δεξπανθενόλη(Βιταμίνη B5):ενυδατώνει και βελτιώνει την ελαστικότητα του τριχωτού της κεφαλής. Τοκοφερόλη:Επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος Βιταμίνη C: αντι-οξειδωτική δράση Αλλαντοΐνη : Καταπραϋνει το τριχωτό της κεφαλής,ανακουφίζει από τη φλεγμονή Sophora japonica : Αναστέλλει την παραγωγή DHT Coix lacryma-jobi /Japanese mugwort (Artemisia princeps)/Calamus (Acorus calamus)/Green tea/ Punica granatum crust extracts: Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπραϋνει, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, αντι-οξειδωτική και αντι-βακτηριακή δράση
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία Ψεκάστε με το Clinical Hair Tonic το τριχωτό της κεφαλής για να ολοκληρωθεί η θεραπεία Θεραπεία στο σπίτι Ψεκάστε με το Clinical Hair Tonic το τριχωτό της κεφαλής μετά απο κάθε λούσιμο.
Τip θεραπείας	Αφήστε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά
Φωτογραφία προϊόντος	

Clinical Hair Shampoo – Σαμπουάν μαλλιών

Είδος	Σαμπουάν
Κωδικός	(Ref. Code: CHRJCT01)
Μέγεθος	Συσκευασία λιανικής: 300 ml
PH	8.5
Περιγραφή	Εξειδικευμένο σαμπουάν για τη θεραπεία αλωπεκίας στο σπίτι
Οφέλη	✓ Αντιβακτηριακό ✓ Βελτίωση της φλεγμονής του τριχωτού της κεφαλής ✓ Επιτάχυνση της ανάπτυξης των μαλλιών ✓ Ενεργοποίηση τρίχας ✓ Πιο υγιή μαλλιά
Ενεργά συστατικά και ιδιότητες	Sophora japonica : Αναστέλλει την παραγωγή DHT Ψευδάργυρος: Αντι-βακτηριακή επίδραση,βελτιώνει την σμηγματορροϊκή φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής, επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών Πανθενόλη :Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύπου 4 και 5, ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος, αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά και δίνει λάμψη,βελτιώνει την ελαστικότητα του τριχωτού της κεφαλής. Νιασιναμίδιο: Προλαμβάνει προβλήματα τριχωτού της κεφαλής, βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία , ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος Βιοτίνη (Βιταμίνη-Η) : βασική συνιστώσα του σχηματισμού της τρίχας, ενεργοποιεί και θρέφει τη τρίχα.
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία Συνιστάται η χρήση του πριν από την εφαρμογή της θεραπείας Θεραπεία στο σπίτι Συνιστάται η χρήση που σε κάθε λούσιμο.
Φωτογραφία Προϊόντος	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΛΕΡ ΜΑΛΛΙΩΝ



GENOSYS®



ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

HR3 MATRIX™ : CLINICAL SCALP PEELING



Σαλικυλικό οξύ

- Αφαιρεί το σμήγμα και τους ρύπους
- Αποφράζει τους θύλακες
- Καταπραύνει τις φλεγμονές του τριχωτού
- Μειώνει τη φαγούρα

Μενθόλη

- Αντιφλεγμονώδες

Sophora japonica

- Αναστέλλει την παραγωγή της DHT

Linne extract

Πράσινο Τσάι/

- Επιταχύνει τη δημιουργία μικροαγγείων

Ligusticum wallichii

- Αναγέννηση ιστών

Franch extract

Bataine

- Επιφανειοδραστική ουσία

Grapefruit seed oil

- Αντιοξειδωση

- Ενυδάτωση

HR3 MATRIX™ : CLINICAL HAIR SOLUTION



Sophora japonica extract

- Αναστέλλει την παραγωγή της DHT

Πεπτίδια :

- Δημιουργία μικροαγγείων

Angio-S

- Αναστολή DHT , ενεργοποίηση εξωκυττάριας ουσίας

Τριπεπτίδιο Χαλκού

Αυξητικοί

- Επιταχύνει την παραγωγή του αγγειακού ενδοθυλιακού αυξητικού παράγοντα
- Επιταχύνει τη διάσπαση της στιβάδας του θυλακίου

Παράγοντες :

KGF

IGF

11 είδη Φυτικών

- Ενισχύει τη λειτουργία και τη δημιουργία νέων αγγείων

Εκχυλισμάτων

- Παρέχει επαρκή θρεπτικά συστατικά στο τριχοθυλάκιο

Grapefruit seed oil

- Αντιοξειδωση

Νιασιναμίδα

- Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος

Πανθενόλη

- Βιταμίνη B5, ενυδάτωση

HR3 MATRIX™ : CLINICAL HAIR SHAMPOO



- | | |
|----------------------------------|--|
| Ψευδαργυρο
ύχος
Πυριθειόνη | <ul style="list-style-type: none"> • Αντιβακτηριακή επίδραση • Βελτιώνει τις σμηγματορροϊκές φλεγμονές του τριχω- τού της κεφαλής • Επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών |
| Πανθενόλη | <ul style="list-style-type: none"> • Ενυδάτωση • Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύπου 4 και 5 • Ομαλοποιεί την έκκριση σμήγματος • Αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά, δίνει λάμψη και βελτιώνει την ελαστικότητα |
| Νιασιναμίδη | <ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος • Προλαμβάνει τα προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής |
| Βιοτίνη
(βιταμίνη Η) | <ul style="list-style-type: none"> • Βασική συνιστώσα της διαμόρφωσης μαλλιών • Ρυθμίζει τις ορμόνες και ενεργοποιεί τη θρέψη των μαλλιών |

HR3 MATRIX™ : CLINICAL HAIR TONIC



- | | |
|--------------------------|---|
| Σαλικυλικό Οξύ | <ul style="list-style-type: none"> • Αποφράζει τους θύλακες • Μειώνει τη φαγούρα |
| Μενθόλη | <ul style="list-style-type: none"> • Αντιφλεγμονώδες |
| Πανθενόλη | <ul style="list-style-type: none"> • Ενυδάτωση • Επιταχύνει την ενεργοποίηση του κολλαγόνου τύπου 4 και 5. Ομαλοποιεί την έκκριση σμήγματος . Αναζωογονεί τα κατεστραμμένα μαλλιά, δίνει λάμψη και βελτιώνει την ελαστικότητα |
| Τοκοφερόλη | <ul style="list-style-type: none"> • Αντιοξειδωση / Επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος |
| Βιταμίνη C | <ul style="list-style-type: none"> • Παραγωγή κολλαγόνου/ Αντιοξειδωση |
| Αλλαντοίνη | <ul style="list-style-type: none"> • Soothes scalp /Relieves inflammation |
| Sophora japonica extract | <ul style="list-style-type: none"> • αναστέλλει τη παραγωγή της DHT |
| Φυτικά Εκχυλίσματα | <ul style="list-style-type: none"> • Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπραΰνει, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, έχει αντι-οξειδωτική και αντι-βακτηριακή δράση. |

GENOSYS®



ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



- Genosys Stamp Roller
- Peeling
- Hair Solution
- Tonic
- Γάντια
- Μπατονέτες
- ΧΤΈΝΑ
- Δοκιμαστικός σωλήνας

HPR³ MATRIX

ΒΗΜΑ 1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ROLLER



Αποστειρώστε το roller **ΠΡΙΝ** και **ΜΕΤΑ** από κάθε θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες .

GENOSYS[®]

ΒΗΜΑ 2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣ



Χρησιμοποιήστε το **CLINICAL SCALP PEELING** για την απομάκρυνση της κερατίνης και για βαθύ καθαρισμό. Αφαιρεί ήπια το σμήγμα, ρύπους και χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας. Τοποθετήστε 5 ml στο δοκιμαστικό σωλήνα. Εμποτίστε τη μπατονέτα κ εφαρμόστε τη ασκώντας τριβή στο υπο θεραπεία τριχωτό της κεφαλής.(7-10 λεπτά) Η ταυτόχρονη μάλαξη διεγείρει και ενισχύει το αποτέλεσμα.

GENOSYS[®]

HP³ MATRIX

ΒΗΜΑ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ






Απομακρύνετε το λευκό καπάκι από το **HAIR SOLUTION** και αφαιρέστε το αλουμινένιο κάλυμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κορυφή του φιαλιδίου και τοποθετήστε το σταγονόμετρο. Ασκείτε προσεκτικά συμπίεση στο σταγονόμετρο και εφαρμόστε το διάλυμα απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής. Ενδείκνυται η χρήση χτένας για τη συγκράτηση των μαλλιών.

GENOSYS[®]

HP³ MATRIX

ΒΗΜΑ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΟΛΛΕΡ



GENOSYS[®]

HP³ MATRIX

ΒΗΜΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ



Εφαρμόστε το **HAIR TONIC** σε όλη την υποθεραπεία περιοχή ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Για μεγαλύτερη απορρόφηση κάντε μασάζ με τα δάχτυλα.

GENOSYS[®]

GENOSYS[®]



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

HP³ MATRIX

ΒΗΜΑ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Χρησιμοποιήστε το **HAIR SHAMPOO** σε κάθε λούσιμο. Ξεπλύνετε τα μαλλιά σας με ζεστό νερό και μετά εφαρμόστε 3-5 ml από το **HAIR SHAMPOO** στο τριχωτό της κεφαλής και κάντε μασάζ 3-5 λεπτά. Ξεπλύνετε τα μαλλιά αρκετές φορές με ζεστό νερό. Στεγνώστε τα μαλλιά και εφαρμόστε το **HAIR TONIC**.

GENOSYS

HP³ MATRIX

ΒΗΜΑ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ



Εφαρμόστε το **HAIR TONIC** στο τριχωτό κάθε πρωί και βράδυ. Για μεγαλύτερη απορρόφηση κάντε μασάζ με τα δάχτυλα.ay.

GENOSYS

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΝΤΕΚΟΛΤΕ



NDCell Anti-Wrinkle Serum – Αντιρυτιδικός Ορός

Είδος	Ορός
Κωδικός	GCND01
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 3.3 ml * 5
PH	5
Περιγραφή	Εξειδικευμένος ορός για την θεραπεία του λαιμού και του ντεκολτέ
Οφέλη	✓ Ενυδάτωση ✓ Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων στο λαιμό και ντεκολτέ ✓ Σύσφιξη και ανόρθωση λαιμού και ντεκολτέ ✓ Αποχρωματισμό δυσχρωμιών στην περιοχή του ντεκολτέ ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	Βιταμίνη Α (Παλμιτική Ρετινόλη): Αντιοξειδωτική δράση. Αποκαθιστά το ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Ομολοποει την υφή του δέρματος και αυξάνει την ελαστικότητα. Βιταμίνη Β3 (Νιασινamίδη): Ενεργοποιεί τα λιπίδια του δέρματος που παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της υγρασίας. Βιταμίνη Β5 (Πανθενόλη): Προστατεύει το δέρμα από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι υπεριώδεις ακτίνες και ο άνεμος. Προσφέρει μακράς διάρκειας ενυδατική δράση και καταπραΰνει το ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. Βιταμίνη C : προσφέρει ενυδάτωση και αντιοξειδωτική δράση ενώ παράλληλα αυξάνει την προστασία του δερματικού φραγμού. Βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη): Βοηθά στην αναστολή του οξειδωτικού στρες παρέχοντας ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Προλαμβάνει τη γήρανση μειώνοντας τις βλάβες του δέρματος που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

	Υαλουρονικό οξύ: ενυδατική δράση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιστών. Β-γλυκάνη : Ενεργοποιεί την ανοσολογική άμυνα του δέρματος, ενισχύει τη φυσική αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, βοηθά στην προστασία του δέρματος από εξωγενείς παράγοντες και προλαμβάνει τα πρόωρα σημάδια γήρατος. Κεραμίδια: Παίξει σημαντικό ρόλο στη δόμηση και στη διατήρηση της διαπερατότητας του δερματικού φραγμού. Παλμιτικό Τριπεπτίδιο 1/ Ολιγοπεπτίδια /Εξαπεπτίδιο 12: Διεγείρουν των πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, προσδίδουν σύσφιξη, λειαίνουν τις ρυτίδες, ενώ παράλληλα ενισχύουν το φυσικό δερματικό φραγμό. Αδενοσίνη: Αποκαθιστά τους κατεστραμμένους ιστούς. Αντιφλεγμονώδη δράση.
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία. Εφαρμόστε τον ορό στην περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ και ξεκινήστε την κύλιση χωρίς να ασκείται καθόλου πίεση.
Φωτογραφία προϊόντος	

NDCell Anti-Wrinkle Cream – Αντιρυτιδική Κρέμα

Είδος	Κρέμα
Κωδικός	GCND02
Μέγεθος	Συσκευασία Λιανικής :50ml
PH	6
Περιγραφή	Εξειδικευμένη κρέμα για την θεραπεία του λαιμού και του ντεκολτέ
Οφέλη	✓ Ενυδάτωση ✓ Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων στο λαιμό και ντεκολτέ ✓ Σύσφιξη και ανόρθωση λαιμού και ντεκολτέ ✓ Αποχρωματισμό δυσχρωμιών στην περιοχή του ντεκολτέ ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	Βιταμίνη Α (Παλμιτική Ρετινόλη): Αντιοξειδωτική δράση. Αποκαθιστά το ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα. Ομολοποιεί την υφή του δέρματος και αυξάνει την ελαστικότητα. Βιταμίνη Β3 (Νιασινamίδη): Ενεργοποιεί τα λιπίδια του δέρματος που παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της υγρασίας. Βιταμίνη Β5 (Πανθενόλη): Προστατεύει το δέρμα από εξωγενείς παράγοντες,

	όπως οι υπεριώδεις ακτίνες και ο άνεμος. Προσφέρει μακράς διάρκειας ενυδατική δράση και καταπραΰνει το ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. Βιταμίνη C : προσφέρει ενυδάτωση και αντιοξειδωτική δράση ενώ παράλληλα αυξάνει την προστασία του δερματικού φραγμού. Βιταμίνη E (Τοκοφερόλη): Βοηθά στην αναστολή του οξειδωτικού στρες παρέχοντας ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Προλαμβάνει τη γήρανση μειώνοντας τις βλάβες του δέρματος που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Υαλουρονικό οξύ: ενυδατική δράση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων ιστών. Β-γλυκάνη : Ενεργοποιεί την ανοσολογική άμυνα του δέρματος, ενισχύει τη φυσική αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, βοηθά στην προστασία του δέρματος από εξωγενείς παράγοντες και προλαμβάνει τα πρόωρα σημάδια γήρατος. Κεραμίδιο: Παίζει σημαντικό ρόλο στη δόμηση και στη διατήρηση της διαπερατότητας του δερματικού φραγμού. Παλμιτικό Τριπεπτίδιο 1/ Ολιγοπεπτίδια /Εξαπεπτίδιο 12: Διεγείρουν των πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, προσδίδουν σύσφιξη, λειαίνουν τις ρυτίδες, ενώ παράλληλα ενισχύουν το φυσικό δερματικό φραγμό. Αδενοσίνη: Αποκαθιστά τους κατεστραμμένους ιστούς. Αντιφλεγμονώδη δράση. Ηλιέλαιο: Αποτρέπει των σχηματισμό ουλών, απαλύνει την εμφάνιση των υπαρχόντων ρυτίδων και γενικά βελτιώνει την εμφάνιση και την υγεία του δέρματος Σκουαλένιο: ενυδατώνει το δέρμα, βοηθά στη μείωση της εμφάνισης ρυτίδων και λεπτών γραμμών Εκχύλισμα Μπάμιας (Hibiscus esculentus): άμεση σύσφιξη με μυοχαλαρωτική δράση
Εφαρμογή	Θεραπεία στο σπίτι Συνιστάται η χρήση του προϊόντος στην περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ για την φροντίδα ημέρας και νύχτας.
Φωτογραφία προϊόντος	

NDCell Calming Neck Mask – Μάσκα

Είδος	Μάσκα
Κωδικός	GCND04
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 30g * 5 φύλλα
Περιγραφή	Εξειδικευμένη μάσκα για τη θεραπεία της περιοχής του λαιμού και του ντεκολτέ

Οφέλη	✓ Ενυδάτωση ✓ Εντι-φλεγμονώδη δράση ✓ Αποκατάσταση ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	Υαλουρονικό οξύ : ενυδατώνει και αποκαθιστά τους κατεστραμμένους ιστούς Aloe Barbadensis Leaf Water: εξαιρετικό φυσικό ενυδατικό και αποτελεσματικό για τη θεραπεία της φλεγμονής. BSASM Complex (βοτανικό σύμπλοκο εκχυλισμάτων):ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα. Βεταΐνη: (από ζαχαρότευτλα,) πρόκειται για ένα φυσικό αμινοξύ που συνθέτει κυρίως ο NMF (φυσικός ενυδατικός παράγοντας). Βοηθά στην βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος. Centella asiatica: αντι-γηραντικές και επουλωτικές ιδιότητες Αδενοσίνη: αποκαθιστά τους κατεστραμμένους ιστούς .Αντιφλεγμονώδη δράση
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία Εφαρμόστε τη μάσκα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κύλισης. Αφήστε τη για 20 λεπτά. *Η μάσκα εφαρμόζεται μόνο στην περιοχή του λαιμού. Για την καταπράυνση της περιοχής του ντεκολτέ μπορείται να εφαρμόστε τη Soothing Repair Post Cream σαν μάσκα.
Φωτογραφία προϊόντος	

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΑΓΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ



EZ CO2 Body Kit – Μάσκα προετοιμασίας σώματος

Είδος	Μάσκα
Κωδικός	GCMA04
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία 5 θεραπειών (5 σωληνάρια Gel 50ml & 5 φύλλα μάσκας 22g)
PH	Gel : 2.5 / Φύλλο μάσκας : 8
Χρήση	Για μία εφαρμογή το κάθε φύλλο μάσκας
Περιγραφή	Μια μάσκα που ενεργοποιεί και προετοιμάζει το δέρμα, έτσι ώστε να μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τα δραστικά συστατικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του ρόλλερ Παράγεται CO 2 από το συνδυασμό του Gel με το Γαλακτικό οξύ του φύλλο της μάσκας.
Οφέλη	✓ Ταχεία κυκλοφορία του αίματος από τη δράση του CO2 (επίδραση Bohr) ✓ Ανανεώνει τον λιπώδη ιστό και βοηθά στην αναδιάρθρωση του δέρματος ✓ Βελτιώνει οπτικά την εμφάνιση του φλοιού του πορτοκαλιού. ✓ Αποστράγγιση και βελτίωση της κατανομής του νερού σε όλους τους ιστούς. ✓ Διατηρεί το σχήμα του σώματος.
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	• Natural Botanical Complex Chamomile Extract : Καταπραΰνει, αναζωογονεί και προστατεύει το δέρμα. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό και έχει ενυδατική δράση. Centella Asiatica Extract : ενισχύει την αναγέννηση του δέρματος χάρη στο Madecassic Acid που περιέχει. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην επούλωση πληγών και την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος. Licorice Extract :Χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς και περιέχει γλυκυριζίνη,φλαβονοειδή, σαπωνίνες και τανίνες. Λειτουργεί καλά σε μικρόβια,φλεγμονές, ιούς και βελτιώνει την ανοσία.

	Scutellaria Laterifolia :Έχει αντι-φλεγμονώδη και αντι-αλλεργική δράση. Έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα στη θεραπεία της φλεγμονώδους δερματίτιδας και της αλλεργικής δερματίτιδας.
Αποτελέσματα	Αδυνάτισμα -Μείωση κατακράτησης νερού Το Glaucine Complex μειώνει την διαφοροποίηση λιποκυττάρων και ενεργοποιεί την αποστράγγιση του νερού από το δέρμα Αντι-φλεγμονώδη δράση Η φλεγμονή συχνά οδηγεί σε τραχύ δέρμα. Η κατάσταση του δέρματος μπορεί να βελτιωθεί με την αναστολή της φλεγμονής. Βελτίωση της ροής του αίματος Τα ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει να μεταφερθούν σε κάθε μέρος των τριχοειδών αγγείων στο δέρμα. Το αίμα ρέει και παρέχει οξυγόνο σε κάθε κύτταρο. Το CO2 απορροφάται από το δέρμα και λειτουργεί για να καθαρίζει το αίμα. Επιδράσεις Bohr Η τόνωση του μεταβολισμού που πραγματοποιείται μέσω του CO2 από την αυξημένη παροχή οξυγόνου από τα ερυθρά κύτταρα του αίματος , αυξάνει τη μερική πίεση οξυγόνου εντός του ιστού. Το CO2 φτάνει εύκολα στα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος, τήκεται στο αίμα και βοηθάει την αιμοσφαιρίνη να μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο στα κύτταρα.
Εφαρμογή	Καθαρίστε την υπο θεραπεία περιοχή. Εφαρμόστε τα 50ml από το EZ CO2 Gel και στη συνέχεια τοποθετήστε πάνω από το Gel ένα EZ CO2 patch ώστε να καλύπτει πλήρως όλη την υποθεραπεία περιοχή. Εάν είναι απαραίτητο, ένα φύλλο μάσκας μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη θεραπεία και σε περισσότερες από μια περιοχές. Το εσωτερικό (της διπλωμένη πλευράς) της μάσκας θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το gel. Αφήστε το για 20 λεπτά. Αφαιρέστε τα υπολείμματα του gel επιμελώς. Η ερυθρότητα που μπορεί να εμφανιστεί στο δέρμα είναι λόγω της επιτάχυνσης της κυκλοφορίας του αίματος.
Τip θεραπείας	Η κρέμα τοπικής αναισθησίας μπορεί να εφαρμοστεί μετά από το EZ CO2 Body Kit.
Φωτογραφία προϊόντος	

Bodycell SM Eraser Serum – Ορός ραγάδων

Είδος	Ορός
Κωδικός	GCSM01
Μέγεθος	Επαγγελματική συσκευασία: 3.3ml* 5 αμπούλες
PH	5
Περιγραφή	Εξειδικευμένος ορός για την θεραπεία των ραγάδων
Οφέλη	✓ Ενυδάτωση ✓ Αποκατάσταση ✓ Μειώνει την εμφάνιση των ραγάδων ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	Χλωριούχος Ψευδάργυρος 1.Ανάπτυξη ιστών και επισκευή: πολλαπλασιασμό κολλαγόνου, διέγερση ινοβλαστών, πολλαπλασιασμό κερατινοκυττάρων. 2.Υποστήριξη του ανοσοποιητικού:Ωρίμανση και διαφοροποίηση των Τ κυττάρων 3.Αντι Φλεγμονώδη & αντιξειδωτική δράση :Αναστολέας της οξειδάσης του NADPH Τριπεπτιδίο Χαλκού -1(Φυσικό cross link τριπεπτιδίο) 1.Ανάπλαση της επιδερμίδας με την ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνών που αφαιρούν τις κατεστραμμένες πρωτεΐνες που βρέθηκαν σε ουλές 2.Βελτίωση τόνο του δέρματος με την τόνωση σχηματισμό νέων τριχοειδών (αγγειογένεση) για τη βελτίωση των αιμοφόρων αγγείων μικροκυκλοφορία 3.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ελαστικότητας του δέρματος και σταθερότητα με την αύξηση της σύνθεσης του κολλαγόνου και της ελαστίνης Παλμιτικό Τριπεπτιδίο -1: διέγερση του κολλαγόνου, διέγερση της σύνθεσης Γλυκοζαμινογλυκάνων.Βοηθάει το δέρμα να διατηρήσει τα φυσικά σταθερότητα του.Ενίσχυση του συνδετικού ιστού και ενεργοποιεί την επούλωση των πληγών Υαλουρονικό οξύ: ενισχύει τις ίνες του κολλαγόνου και της ελαστίνης Πανθενόλη:Αυξάνει την αντίσταση στις λοιμώξεις. Έχει καταπραυντική και αντιφλεγμονώδη δράση.Ενισχύει τη δερματική αναγέννηση μετά από θεραπείες. Παρέχει τροφική δραστηριότητα στο επιθήλιο. Αυξάνει τα επιπέδα ενυδάτωσης του δέρματος.Παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα.
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία Εφαρμόστε το προϊόν στην υπο θεραπεία περιοχή μαζί με το ρόλλερ σώματος.
Φωτογραφία προϊόντος	

Bodycell SM Eraser Cream – Κρέμα ραγάδων

Είδος	Κρέμα
Κωδικός	Συσκευασία Λιανικής GCSM02 και Επαγγελματικής Συσκευασίας GCSM03
Μέγεθος	Συσκευασία Λιανικής: 100ml Επαγγελματική συσκευασία :230ml
PH	6
Περιγραφή	Εξειδικευμένη κρέμα για την θεραπεία των ραγάδων
Οφέλη	✓ Ενυδάτωση ✓ Αποκατάσταση ✓ Μειώνει την εμφάνιση των ραγάδων ✓ Φόρμουλα χωρίς Αλκοόλ – /Paraben/Αρώματα /Χρωστικές/Επιφανειοδραστικές Ουσίες
Ενεργά συστατικά και Ιδιότητες	Χλωριούχος Ψευδάργυρος 1.Ανάπτυξη ιστών και Επισκευή: πολλαπλασιασμό κολλαγόνου, διέγερση ινοβλαστών, πολλαπλασιασμό κερατινοκυττάρων. 2.Υποστήριξη του ανοσοποιητικού:Ωρίμανση και διαφοροποίηση των Τ κυττάρων 3.Αντι Φλεγμονώδη & αντιξειδωτική δράση :Αναστολέας της οξειδάσης του NADPH Phytosterol Complex : Περιέχει φυτικές στερόλες από γάλα σόγιας, όσπρια και σιτηρά. Παρέχει ένα φυσικό προστατευτικό παράγοντα για το άθικτο και επίσης για το κατεστραμμένο δέρμα. Natural Vitamin Shell Complex : Παρέχει εξαιρετικά ενυδατική δράση. Joboba Oil: πλούσιο σε βιταμίνη A, E, D. Ιδανικό για το ευαίσθητο δέρμα και προβληματικό δέρμα. Macadamia Oil: πλούσιο σε βιταμίνη A, E, D. Έχει άμεση διαδερμική διείσδυση. Αποκαθαριστά και θρέφει το δέρμα. Grapeseed oil: πλούσιο σε βιταμίνη A, D και E. Προσδίδει ελαστικότητα στο δέρμα εξαιτίας του λινολεϊκού οξέος και των κατεχινών. Walnut oil seed :περιέχει βιταμίνη A, B, D και E. Κάνει το δέρμα απαλό και παρέχει πλούσια θρέψη. Centella Asiatica:Βελτιώνει την εππούλωση πληγών.Ενισχύει την ικανότητα για την αναγέννηση νευραξόνων. Επουλώνει την ακόλουθη βλάβη των νεύρων. Αλλαντοΐνη: Φυτικό εκχύλισμα από τις ρίζες του Comfrey.Άριστη επίδραση στην καταστολή της φλεγμονής και εξαιρετικό αποτέλεσμα σύσφιξης. Bisabolol: Έίναι παράγωγο της M. chamomilla (γερμανικό χαμομήλι), βοηθά στην ενίσχυση της διαδερμικής διείσδυσης των ενεργών συστατικών.Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του Bisabolol είναι οι αντι-φλεγμονώδεις, αντι-ερεθιστικές, αντι-βακτηριακές, και μη-αλλεργιογόνες ιδιότητες. Παπαΐνη :είναι ένα ένζυμο που προέρχεται από τον καρπό της παπάγιας. Χρησιμοποιείται σε τοπικά φαρμακευτικά προϊόντα για την αφαίρεση μολυσμένων ή νεκρών ιστών από μολυσμένα τραύματα. Η Παπαΐνη είναι επίσης ένα άλφα υδροξύ οξύ που βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δέρματος και την προαγωγή υγιέστερων Βρωμελίνη: είναι μία πρωτεΐνη πέψης ενζύμου που βρίσκεται στον καρπού του ανανά. Βοηθάει στην απολέπιση και αναζωογόνηση του δέρματος. Τριπεπτιδίο Χαλκού -1(Φυσικό cross link τριπεπτιδίο) :Ανάπλαση επιδερμίδας με την ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνών που αφαιρούν τις

	κατεστραμμένες πρωτεΐνες που βρέθηκαν σε ουλές.Βελτίωση του τόνο του δέρματος με την τόνωση σχηματισμού νέων τριχοειδών (αγγειογένεση) για τη βελτίωση της μικροκυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων. Βελτίωση ελαστικότητας του δέρματος και σταθερότητας με την αύξηση της σύνθεσης του κολλαγόνου και της ελαστίνης. Παλμιτικό Τριπεπτίδιο -1: διεγείρει τη σύνθεσης κολλαγόνου και γλυκοζαμινογλυκάνων. Βοηθάει το δέρμα να διατηρήσει τη φυσική σταθερότητα του.Ενισχύει το συνδετικό ιστό και ενεργοποιεί την επούλωση των πληγών.
Εφαρμογή	Επαγγελματική θεραπεία Συνιστάται η χρήση της κρέμας για την ολοκλήρωση της θεραπείας. Θεραπεία στο σπίτι Συνιστάται η χρήση της κρέμας σε καθημερινή βάση (πρωί- βράδυ) σε καθαρό δέρμα στην περιοχή των ραγάδων.
Φωτογραφία προϊόντος	

The logo for GENOSYS, featuring the word "GENOSYS" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red gear-like icon with a white center.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ROLLER ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΒΗΜΑ 1 Καθαρίστε την υπο θεραπεία περιοχή.

ΒΗΜΑ 2 Εφαρμόστε το EZ CO2 Body Gel και εφαρμόστε τη EZ CO2 Body Mask πάνω στο gel. Περιμένετε για 20 λεπτά.

ΒΗΜΑ 3 Αφαιρέστε τη μάσκα και το gel με σπάτουλα.
Απομακρύνετε τα υπολείμματα με ζεστό νερό.

ΒΗΜΑ 4 Εφαρμόστε τοπικά αναισθητική κρέμα για 30 λεπτά.(προεγχειρητικά).

ΒΗΜΑ 5 Απομακρύνετε τα υπολείμματα και απολυμάνετε την υποθεραπεία περιοχή.

ΒΗΜΑ 6 Εφαρμόστε τον ορό και ξεκινήστε τη κύλιση.

ΒΗΜΑ 7 Εφαρμόστε το INTENSIVE REPAIR GEL και περιμένετε για 10 λεπτά

ΒΗΜΑ 8 Εφαρμόστε τη κρέμα στην υπο θεραπεία περιοχή

ΒΗΜΑ 1 Καθαρίστε την υποθερεία περιοχή**ΒΗΜΑ 2**

Εφαρμόστε το EZ CO2 Body Gel και τοποθετήστε τη EZ CO2 Body Mask πάνω από το Gel. Περιμένετε 20 λεπτά


Η επιφάνεια με την επικάλυψη ζελατίνης να τοποθετείται εξωτερικά

**ΒΗΜΑ 3**

Αφαιρέστε τη μάσκα και το gel με σπάτουλα. Απομακρύνετε τα υπολείμματα με ζεστό νερό.

ΒΗΜΑ 4 (προαιρετικά)

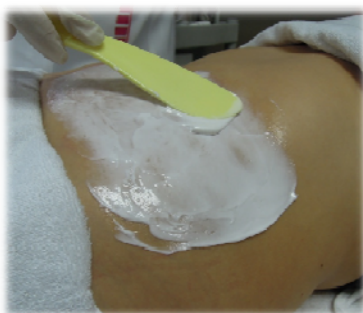Εφαρμόστε στην υποθεραπεία περιοχή κρέμα τοπικής αναισθησίας για 30 λεπτά. Αφαιρέστε τη με καθαριστικό. Πριν ξεκινήσετε τη κύλιση απολύμάνετε τη περιοχή.




ΒΗΜΑ 5

Απολυμάνετε την υπο θεραπεία περιοχή και εφαρμόστε τον ορό .
Η κατάλληλη επιλογή του ορού εξαρτάται από το είδος της
δερματικής βλάβης.



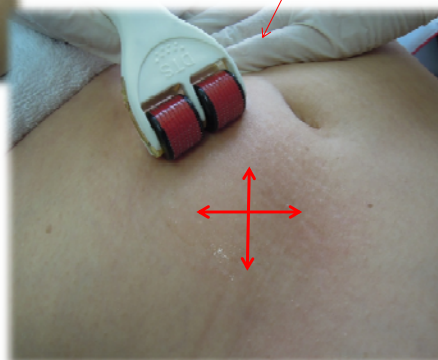
Πρέπει να τεντώνετε το δέρμα.

**ΒΗΜΑ 6**

Ξεκινήστε τη κύλιση κάνοντας
κάθετες και οριζόντιες κινήσεις

ΒΗΜΑ 7

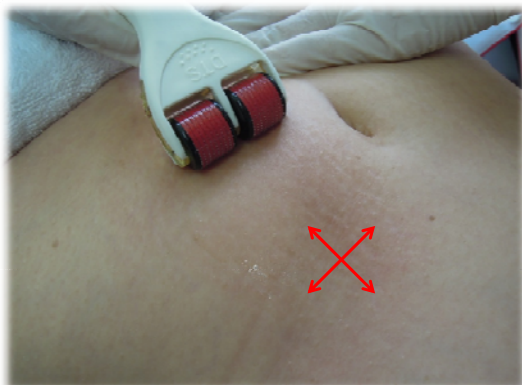
Συνεχίστε τη κύλιση κάνοντας πλάγιες κινήσεις .
Ανάμεσα στα περάσματα εφαρμόστε μικρή ποσότητα από τον ορό σας.

**ΒΗΜΑ 8**

Εφαρμόστε το ρόλλερ σαν στάμπα. Αυτό το βήμα ενδείκνυται μόνο για τη θεραπεία των ραγάδων. Συνολικός χρόνος κύλισης 10 λεπτά.




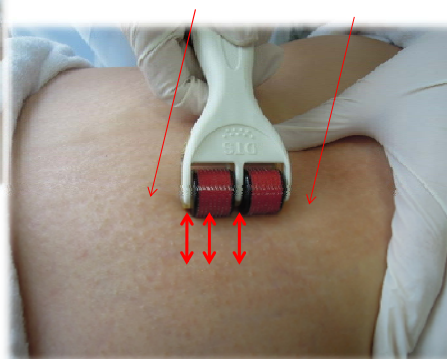Ανασηκώστε τη περιοχή.



ΒΗΜΑ 10

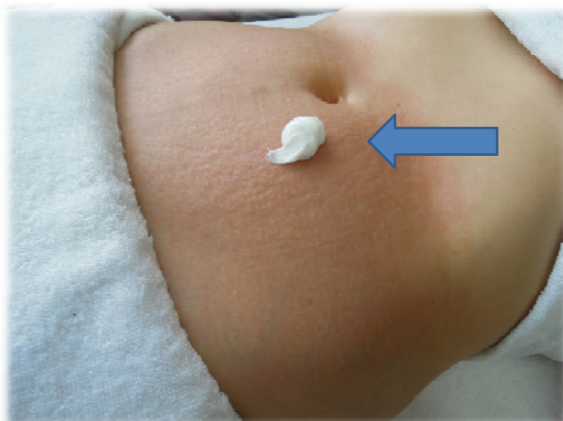Εφαρμόστε τη κρέμα ολοκλήρωσης στην υπο θεραπεία περιοχή.



Η θεραπεία ολοκληρώθηκε!



Συνιστάται η χορήγηση προϊόντων για οικιακή χρήση ανάλογα με τη δερματική βλάβη για συντήρηση και ενίσχυση της θεραπείας.



EZ CO₂ BODY KIT

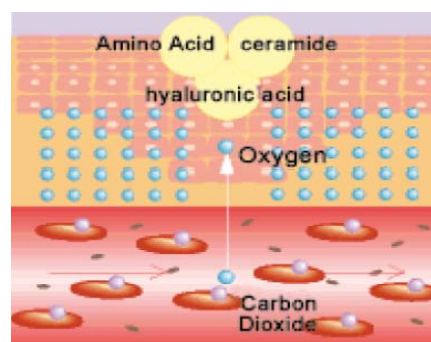
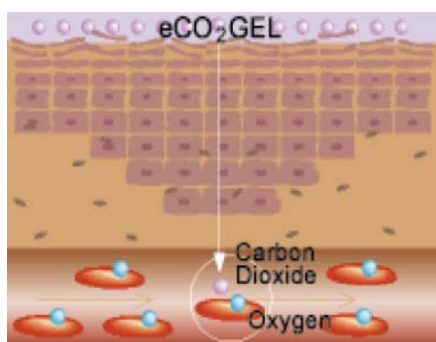
● EZ CO₂ BODY GEL

● EZ CO₂ BODY MASK

EZ CO₂ BODY KIT- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Ταχεία κυκλοφορία του αίματος από τη δράση του C O₂. (Επίδραση Bohr)
- Ανανεώνει λιπώδη ιστό και βοηθά το δέρμα να αναδιρθωθεί. Μειώνει οπτικά το πορτοκαλί εμφάνιση κελυφός.
- Βελτίωση της διανομής και της αποστράγγισης του νερού σε όλο τον ιστό.

EZ CO₂ BODY KIT-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ




- CO₂ απορροφάται διαμέσου των ιστών και φθάνει τα αιμοφόρα αγγεία, μυών και των νεύρων.

CO₂ αύξηση αγγειοδιαστολής,
Η ροή του αίματος και εκπομπής του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη(Bohr Effect)

3

3

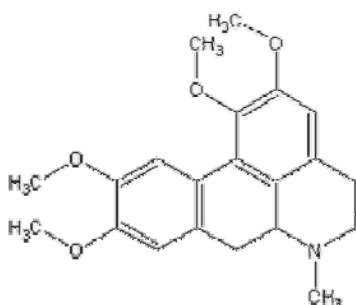EZ CO₂ BODY KIT- Glaucien Complex




Χαρακτηριστικά:

-Αναστολή της διαφοροποίησης των προλιποκυττάρων μέσω της μείωση της ροής του ασβεστίου, και προώθηση της λιπόλυσης.

-Αντι-φλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση

4

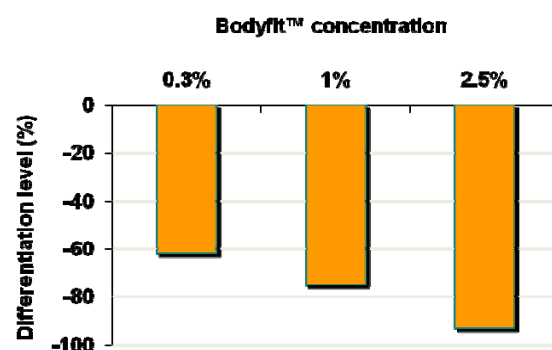
EZ CO₂ BODY KIT



Glaucine complex (Bodyfit) reduces adipocyte differentiation remarkably.

EZ CO₂ BODY KIT

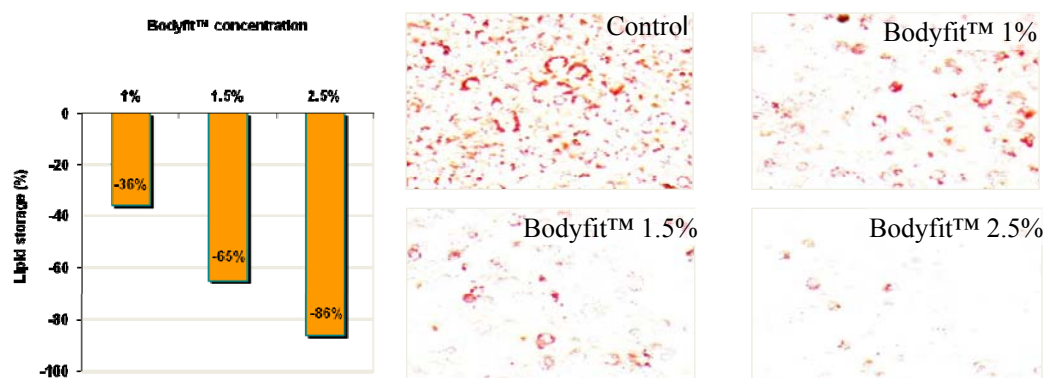
Lipids are detected by red coloration



Bodyfit remarkably reduces the lipid level in


EZ CO₂ BODY KIT

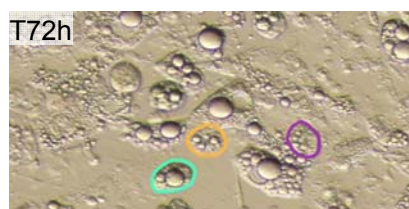Παρατήρηση Λιποκυττάρων με μικροσκόπιο για 72 ώρες



7

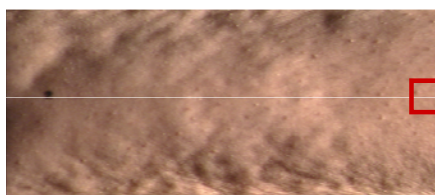
EZ CO₂ BODY KIT



EZ Body Kit CO₂ μειώνει την τραχύτητα του δέρματος κατά 43%

8

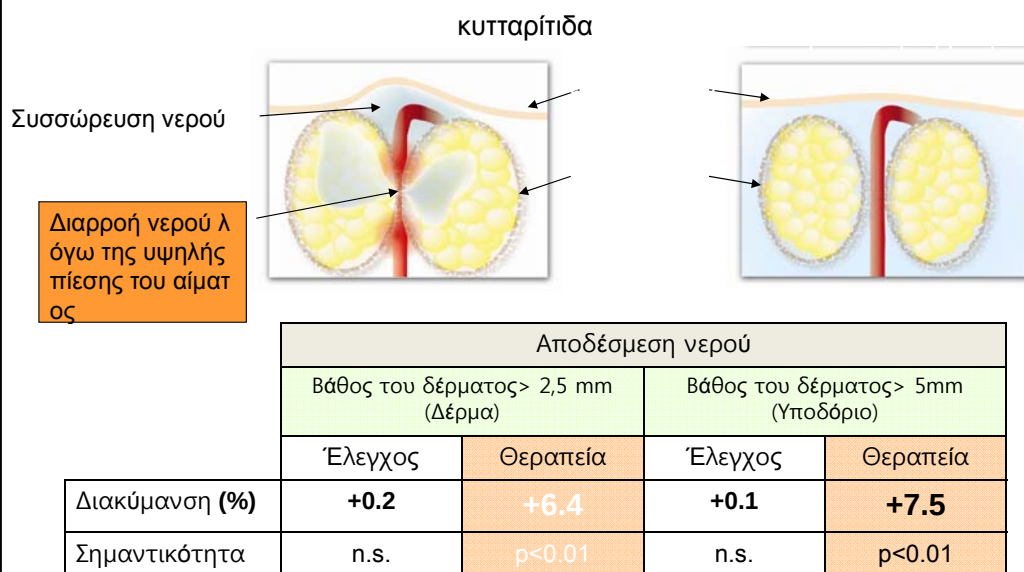EZ CO₂ BODY KIT



Co2 Body kit κάνει το σώμα πιο λεπτό με την ενεργοποίηση της

EZ CO₂ BODY KIT - Natural Botanical Complex



Καταπραΰνει, αναζωογονεί και προστατεύει το δέρμα. Προωθεί το μεταβολισμό και έχει ενυδατική δράση.



Εξάγεται από τα φύλλα και τις ρίζες των δέντρων Gotu Kola που φύονται στην Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τη Νότια Αφρική. Έχει αναδειχθεί ως ένα συστατικό το οποίο έχει αποτέλεσμα στην αναγέννηση του δέρματος και οφείλεται στο madecassic acid που έχει. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην επούλωση πληγών και την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος.



Χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς και περιέχει γλυκυριζίνη, φλαβονοειδή, σαπωνίνες και τανίνες. Λειτουργεί καλά σε μικρόβια, φλεγμονή, ιούς και βελτιώνει την ανοσία.



Έχει αντι-φλεγμονώδη και αντι-αλλεργική δράση. Έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα στη θεραπεία της φλεγμονώδους δερματίτιδας και της αλλεργικής δερματίτιδας.

EZ CO₂ BODY KIT -Conclusion

- Το Glaucine σύμπλοκο μειώνει το μέγεθος των λιποκυττάρων και εμποδίζει τη διόγκωσή τους εξαλείφοντας το στάσιμο νερό στο δέρμα. Κάνει το σώμα να φαίνεται πιο λεπτό.
- Το Σύμπλοκο Φυσικών Βοτανικών Εκχυλισμάτων κάνει το δέρμα απαλό και λείο και καταπραύνει γρήγορα την επιφάνεια του δέρματος.
- Όταν χρησιμοποιείται συστηματικά, έχει το αποτέλεσμα στη κυτταρίτιδα καθώς το CO₂ βελτιώνει τη ροή του αίματος.

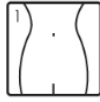
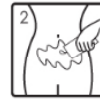
11

Product Composition



5 treatment (Mask*5+Gel*5)


12

**STEP 1 PREPARATION****STEP 2 BODY GEL**


Open EZ Co2 gel(pouch) and apply treatment area.

**STEP 3 BODY MASK**

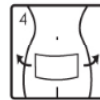Open EZ Co2 mask(sheet) and Spread coated side upward.

**STEP 4 ACTION**

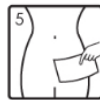Apply EZ Co2 mask(sheet) on the gel and leave it for 20mins.

**STEP 4 FINISH**

Remove EZ Co2 mask(sheet) and Gel with spatula.
Cleanse with warm water.

CLINICAL DATA

Case 1



15

Case 2



16

Case 3





ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MICRONNEDLING (0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 mm)

- Όσοι έχουν ιστορικό ή προδιάθεση με χηλοειδές ή υπερτροφικές ουλές.
- Όσοι είναι αλλεργικοί στο ανοξείδωτο ατσάλι (ανεξάρτητα από το μήκος της βελόνας).
- Υπερτροφικές κρεατοελιές, μυρμηγκιές ή οποιαδήποτε άλλη υπερτροφική βλάβη.
- Όσοι παρουσιάζουν διαταραχές με την πήξη του αίματος, όπως η αιμοφιλία.
- Όσοι παίρνουν φάρμακα για την καρδιά, για υπέρταση ή είναι διαβητικοί.
- Όσοι έχουν σμηγματορροϊκό έκζεμα / ατοπική δερματίτιδα / ψωρίαση / ευρυαγγεία
- τηλεγγιεκτασίες / ροδόχρους ακμή.
- Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει Roaccutane τους τελευταίους 3 μήνες .
- Όσοι έχουν ανοιχτές πληγές , κοψίματα ή εκδορές πάνω στο δέρμα.
- Όσοι έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπείες τον τελευταίο χρόνο .
- Όσοι έχουν μειωμένη ικανότητα επούλωσης τραύματος.
- Όταν υπάρχει εστία απλού έρπητα (έρπης) ή άλλης λοίμωξης ή χρόνια πάθηση του δέρματος στην περιοχή που πρόκειται να θεραπευτεί.
- Σε περιοχές του δέρματος που είναι μωδιασμένες ή υπάρχει μειωμένη αίσθηση.
- Κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και θηλασμού.
- Μετά από μια επεμβατική θεραπεία με λέιζερ (ανάλογα με τη έκταση της περιοχής και με τις παραμέτρους του κάθε λέιζερ, το συνιστώμενο διάστημα είναι διαφορετικό)
- Ο καθένας που εμφανίζει οποιοδήποτε ασθένεια του δέρματος στο πρόσωπο ή διαταραχή αποτελεί αντένδειξη
- Όσοι παίρνουν ομοιοπαθητικά, βότανα ή βιταμίνες που αραιώνουν το αίμα
- Όσοι έχουν κάνει fillers ή Botox, τους τελευταίους 3 μήνες στην περιοχή των χειλιών και του προσώπου (κάθε τύπος fillers και Botox έχουν διαφορετική διάρκεια του αποτελέσματος. Μόνο αν κριθεί απαραίτητο από τον θεραπευτή μπορεί να εφαρμόσει το ρόλλερ αποφεύγοντας τις περιοχές που έχουν γίνει τα ενέσιμα)
- Όσοι έχουν υποβληθεί σε κάποιο χειρουργείο στην περιοχή του προσώπου τους τελευταίους 4 μήνες
- Όσοι έχουν 'MONIMA' εμφυτεύματα, όπως Dermagen ή Shark Cartilage τους τελευταίους 6 μήνες
- Καθένας που έχει χρησιμοποιήσει κορτικο-στεροειδή στην περιοχή της θεραπείας, καθώς προκαλούν λέπτυνση του δέρματος

GENOSYS®

Η Θεραπεία MICRONEEDLING έχει λιγότερους περιοριστικούς παράγοντες κατά την εφαρμογή της σε σύγκριση με τη θεραπεία των λέιζερ. Η παραπάνω λίστα των αντενδείξεων ενδείκνυται για την πρόληψη τυχόν παρενεργειών της θεραπείας. Η χρήση του ρόλλερ θα πρέπει να γίνει μόνο μετά από απόφαση του θεραπευτή αφού έχει γίνει ακριβής διάγνωση του δέρματος. Ενδείκνυται η χρήση Έντυπου Συγκατάθεσης που πρέπει να υπογράφεται από τον ασθενή στην περίπτωση της ιατρικής περίθαλψης.

Στην περίπτωση που θα γίνει χρήση του 0,25 mm ρόλλερ προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση των ενεργών συστατικών των προϊόντων περιποίησης του δέρματος η παραπάνω λίστα μπορεί να εφαρμόζεται λιγότερο αυστηρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ


1. Η πίεση θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την περιοχή που εφαρμόζεται καθώς στο μέτωπο, γύρω από τα μάτια και το άνω χείλος υπάρχουν πολλά σημεία αίσθησης πόνου.
2. Η κύλιση θα πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα μέχρι να κοκκινίσει το δέρμα. Η διάρκεια της κύλισης πρέπει να είναι περίπου 10 λεπτά.
3. Κατά τη διάρκεια της κύλισης ο ασθενής πρέπει να έχει κλειστά μάτια.
4. Κατά τη διάρκεια της κύλισης χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να τεντώσετε την περιοχή που εφαρμόζεται το ρόλλερ.
5. Ζιγκ-ζαγκ, νευρικές και καμπυλωτές κινήσεις πρέπει να αποφεύγονται. Συνιστάται αργή κύλιση με τα DTS ρόλλερ.
6. Το μεσοδιάστημα για τις θεραπείες συντήρησης προσαρμόζεται ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος του ασθενούς. Ο θεραπευτής κρίνει και ρυθμίζει το πρόγραμμα θεραπειών.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

1. Μετά από 4 ώρες μπορεί να πλήνει το πρόσωπό του και κάθε μέρα θα πρέπει να χρησιμοποιεί αντηλιακό. Για τις πρώτες 10 ημέρες δεν θα πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο χωρίς αντηλιακό. Συνιστάται η συχνή ανανέωση του αντηλιακού.
2. Μετά τη θεραπεία, λόγω της ταχύτερης αποξήρανση του δέρματος, μπορεί να εμφανιστεί αποφολίδωση. Λόγο της ανανέωσης των κυττάρων το δέρμα γίνεται ξηρό προσωρινά. Συνεπώς, θα πρέπει να τονιστεί στον ασθενή η σημασία της ενυδάτωσης του δέρματος. Ενδείκνυται η χρήση προϊόντων με βάση το νερό ή σε μορφή gel που θα ενισχύσουν την υγρασία του προσώπου τουλάχιστον για μια εβδομάδα.
Θεραπεία με 1.5mm ρόλλερ : μπορεί να εμφανιστεί την 1η εβδομάδα.
Θεραπεία με 0.5mm~1.0 mm ρόλλερ : μετά από 2 με 4 ημέρες
3. Τις πρώτες 2 ημέρες ίσως εμφανιστεί κάποιο αίσθημα κάψου μετά τη χρήση των προϊόντων.
4. Τις 2 πρώτες ημέρες μετά τη θεραπεία θα πρέπει να αποφεύγει την τεχνητή θερμότητα (ζεστό μπάνιο, σάουνα κτλ), το κολύμπι (σε θάλασσα και πισίνα) όπως και το αλκοόλ.

GENOSYS®

προϊόντα			ποσότητα	συσκευασία	τιμή χονδρικής	προτεινόμενη τιμή λιανικής	
προϊόν	κωδ.	περιγραφή προϊόντος					
DTS Roller							
DTS Manual Roller (one-body type, κεφαλή μη-αποσπώμενη)							
	GMRJCR01-025	MEDI 0.25 mm	Standard Manual Roller	1τεμ.	τεμ.	35,00	65,00
	GMRJCR01-050	MEDI 0.5 mm		1τεμ.	τεμ.	47,00	-
	GMRJCR01-100	MEDI 1.0 mm		1τεμ.	τεμ.	47,00	-
	GMRJCR01-150	MEDI 1.5 mm		1τεμ.	τεμ.	47,00	-
	GMRJCR01-200	MEDI 2.0 mm		1τεμ.	τεμ.	47,00	-
	GMRJCR02-025	MEDI Narrow 0.25mm	Narrow Manual Roller- Scalp or Narrow part of face	1τεμ.	τεμ.	30,00	55,00
	GMRJCR02-050	MEDI Narrow 0.5 mm		1τεμ.	τεμ.	39,00	-
	GMRJCR02-100	MEDI Narrow 1.0 mm		1τεμ.	τεμ.	39,00	-
	GMRJCR02-150	MEDI Narrow 1.5 mm		1τεμ.	τεμ.	39,00	-
	GMRJCR02-200	MEDI Narrow 2.0mm		1τεμ.	τεμ.	39,00	-
DTS Vibrating Roller (με δόνηση, αποσπώμενη κεφαλή)							
	GVRJCR01-025	Rejuve(Vibrating) 0.25mm	Vibrating Roller	1τεμ.	τεμ.	60,00	110,00
	GVRJCR01-050	Rejuve(Vibrating) 0.5mm		1τεμ.	τεμ.	74,00	-
	GVRJCR01-100	Rejuve(Vibrating) 1.0mm		1τεμ.	τεμ.	74,00	-
	GVRJCR01-150	Rejuve(Vibrating) 1.5 mm		1τεμ.	τεμ.	74,00	-
	GCHJCR01-025	Head Standard 0.25mm	Standard Replacement Heads	2τεμ.	κουτί	58,00	107,00
	GCHJCR01-050	Head Standard 0.5 mm		2τεμ.	κουτί	73,00	-
	GCHJCR01-100	Head Standard 1.0 mm		2τεμ.	κουτί	73,00	-
	GCHJCR01-150	Head Standard 1.5 mm		2τεμ.	κουτί	73,00	-
	GCHJCR01-200	Head Standard 2.0 mm		2τεμ.	κουτί	73,00	-
	GCHJCR02-025	Head Narrow 0.25mm	Narrow Replacement Heads	2τεμ.	κουτί	55,00	100,00
	GCHJCR02-050	Head Narrow 0.5 mm		2τεμ.	κουτί	71,00	-
	GCHJCR02-100	Head Narrow 1.0 mm		2τεμ.	κουτί	71,00	-
	GCHJCR02-150	Head Narrow 1.5 mm		2τεμ.	κουτί	71,00	-
	GCHJCR02-200	Head Narrow 2.0 mm		2τεμ.	κουτί	71,00	-
DTS Body Roller (αποσπώμενη κεφαλή) / Stamp / Eye Roller							
	GBRJCR01-025	Body Roller (Twin Needle) 0.25mm	Manual Body Roller	1τεμ.	τεμ.	48,00	90,00
	GBRJCR01-050	Body Roller (Twin Needle) 0.5mm		1τεμ.	τεμ.	61,00	-
	GBRJCR01-100	Body Roller (Twin Needle) 1.0mm		1τεμ.	τεμ.	61,00	-
	GBRJCR01-150	Body Roller (Twin Needle) 1.5mm		1τεμ.	τεμ.	61,00	-
	GBRJCR01-200	Body Roller (Twin Needle) 2.0mm		1τεμ.	τεμ.	61,00	-
	GBRJCR02-025	Body Twin Head 0.25 mm	κεφαλές Body roller	2τεμ.	κουτί	76,00	140,00
	GBRJCR02-050	Body Twin Head 0.5 mm		2τεμ.	κουτί	98,00	-
	GBRJCR02-100	Body Twin Head 1.0 mm		2τεμ.	κουτί	98,00	-
	GBRJCR02-150	Body Twin Head 1.5 mm		2τεμ.	κουτί	98,00	-
	GBRJCR02-200	Body Twin Head 2.0 mm		2τεμ.	κουτί	98,00	-
	GDSJCR01-025	Stamp(Standard) 0.25mm	Stamp (αποσπώμενη)	1τεμ.	τεμ.	21,00	40,00
	GDSJCR01-050	Stamp(Standard) 0.5 mm		1τεμ.	τεμ.	25,00	-
	GDSJCR01-100	Stamp(Standard) 1.0 mm		1τεμ.	τεμ.	25,00	-
	GERJCR01-025	Eye Roller(manual)	Manual Eye Roller	1τεμ.	τεμ.	18,00	35,00
	GERJCR01-050	Eye Roller(manual)		1τεμ.	τεμ.	19,00	-
	GDRCR01-025	Manual Detachable 0.25mm	Manual Detachable Roller - Changeable heads, Handle Auto clivable	1τεμ.	τεμ.	40,00	75,00
	GDRCR01-050	Manual Detachable 0.50mm		1τεμ.	τεμ.	49,00	-
	GDRCR01-100	Manual Detachable 1.0mm		1τεμ.	τεμ.	49,00	-
	GDRCR01-150	Manual Detachable 1.5mm		1τεμ.	τεμ.	49,00	-
	GDRCR01-200	Manual Detachable 2.0mm		1τεμ.	τεμ.	49,00	-

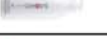GENOSYS Cosmetics							
προϊόντα				ποσότητα	συσκευασία	τιμή χονδρικής	προτεινόμενη τιμή λιανικής
	κωδ.	περιγραφή προϊόντος					
GENOSYS Mask							
	GEZJCM01	Ez CO2 Mask	Ez CO2 Mask	5 jars + 5 φακελάκια	κουτί	28,90	-
	GGMJCM03	Peptide Gel Mask	Peptide Gel Mask	5 φακελάκια	κουτί	19,80	-
	GMMJCM02	Cryogenic Mask	Cryogenic Mask	6 φακελάκια	κουτί	17,60	-
GENOSYS Peeling & Solution							
	GSPJCP01	SRS	Skin Renewal System - Peeling	2ml * 10 αμπ.	κουτί	66,70	-
	GAWJCA01	AWS	Anti-Wrinkle Solution	2ml * 10 αμπ.	κουτί	40,00	-
	GSWJCA02	SWS	Skin Whitening Solution	2ml * 10 αμπ.	κουτί	40,00	-
	GPCJCA03	PCS	Problem Control Solution	2ml * 10 αμπ.	κουτί	40,00	-
	GCTJCA04	CTS	Cocktail Solution - Anti-Scar, Regeneration	2ml * 10 αμπ.	κουτί	40,00	-
	GCVJCA05	CVS	Cocktail Solution - Protection, Nutrition	2ml * 10 αμπ.	κουτί	40,00	-
GENOSYS Serum							
	GAWJCS01	AWS	Nano Anti-Wrinkle Serum	30ml * 1 τεμ.	κουτί	21,70	45,00
	GSWJCS02	SWS	Nano Skin Whitening Serum	30ml * 1 τεμ.	κουτί	21,70	45,00
	GPCJCS03	PCS	Intensive Problem Control Serum	30ml * 1 τεμ.	κουτί	21,70	45,00
προϊόντα				ποσότητα	συσκευασία	τιμή χονδρικής	προτεινόμενη τιμή λιανικής
	κωδ.	περιγραφή προϊόντος					
GENOSYS Creams							
	GHSJCC01	HSC	Intensive Hydro- Smoothing Cream	50ml * 1τεμ.	τεμ.	18,30	38,00
	GHSJCC06	HSC(Jar)	Intensive Hydro- Smoothing Cream	250ml * 1τεμ.	τεμ.	30,80	-
	GMFJCC02	MFC	Intensive Multi- Functional Cream	50ml * 1τεμ.	τεμ.	19,40	40,00
	GMFJCC05	MFC(Jar)	Intensive Multi- Functional Cream	250ml * 1τεμ.	τεμ.	33,10	-
	GPCJCC03	PCC	Intensive Problem Control Cream	50ml * 1τεμ.	τεμ.	18,30	36,00
	GPCJCC07	PCC(Jar)	Intensive Problem Control Cream	250ml * 1τεμ.	τεμ.	30,80	-
	GBBJCC04	BBC	Intensive Blemish Balm Cream	50ml * 1τεμ.	τεμ.	22,80	45,00
GENOSYS Cleanser/Toner							
	GSOUCC01	Snow O2	Snow O2 Cleanser	180ml * 1τεμ.	κουτί	17,60	32,00
	GSOJCC02	Snow O2	Snow O2 Cleanser	500ml * 1τεμ.	τεμ.	26,00	-
	GSBJCT01	Snow Booster	Snow Booster Toner	200ml * 1τεμ.	κουτί	12,60	25,00
	GSBJCT02	Snow Booster	Snow Booster Toner	1000ml * 1τεμ.	τεμ.	19,30	-
GENOSYS Mist							
	GMTJCT01	RHM	Revitalizing Hydro Mist	70ml * 1τεμ.	κουτί	9,70	20,00
GENOSYS Cosmetics - Hair							
GENOSYS HR3 MATRIX							

	GHSJCS02	CHS - 1	Clinical Hair Solution	5ml * 6τεμ.	κουτί	49,00	-
	GSPJCP01	CSP	Clinical Scalp peeling	100ml * 1τεμ.	κουτί	17,00	34,00
	GHTJCT01	CHT	Clinical Hair Tonic	70ml * 1τεμ.	κουτί	18,00	36,00
	GHPJCP01	CHS - 2	Clinical Hair Shampoo	300ml * 1τεμ.	κουτί	18,00	36,00

GENOSYS Cosmetics - Kit Box

	GHKJCK01	HR3 MATRIX KIT BOX	Hair Treatment Kit	Manual Roller(N) x 1 CHS -1 x 6 CSP x 1 Dropper x 2	κουτί	92,50	0,00
	GPKJCK05	Mesotherapy Home Kit	Meso Home Kit - AWS/SWS/PCS	Vibrating Roller x 1 RHM x 1 Serum (AWS/SWS/PCS) x 1	1 κουτί	68,00	-
					5 κουτιά	59,00	0,00
	GSKJCK06	Snow Cell Peeling Kit	Whitening Snow Peel System	WSA(50ml) x 1 EZP(7g) x 1 WRS(10ml) x 4	1 κουτί	52,00	-
					5 κουτιά	45,00	0,00
	GEKJCK01	Eye Cell Kit	Eye Cell	Eye Cream x 1 Eye Serum x 1 Eye Patch x 1	1 κουτί	78,00	-
					5 κουτιά	62,00	120,00

NEW PRODUCTS 2012

	GSRC08	SRP	Soothing Repair Cream	20ml*1τεμ.	κουτί	10,30	21,00
	GECC09	EGP	Eye Peptide Gel Patch	100g * 1τεμ.	κουτί	21,40	45,00
	GESS04	ECS	Eye Contour Serum	10ml * 1τεμ.	κουτί	21,40	45,00
	GEPM04	ECC	Eye Contour Cream	20ml * 1τεμ.	κουτί	23,00	45,00

1. όροι αποπληρωμής : 3% έκπτωση σε αποπληρωμή με μετρητά / διακανονισμό με προκαταβολή και δίμηνη επιταγή
2. Πιστοποιητικό : CE approved, FDA registered, KFDA approved
3. όλες οι αποσπώμενες κεφαλές (rollers), συσκευάζονται σε κουτί 2 τεμαχίων