


OMEGA Light Low Level LED Therapy





OMEGA Light

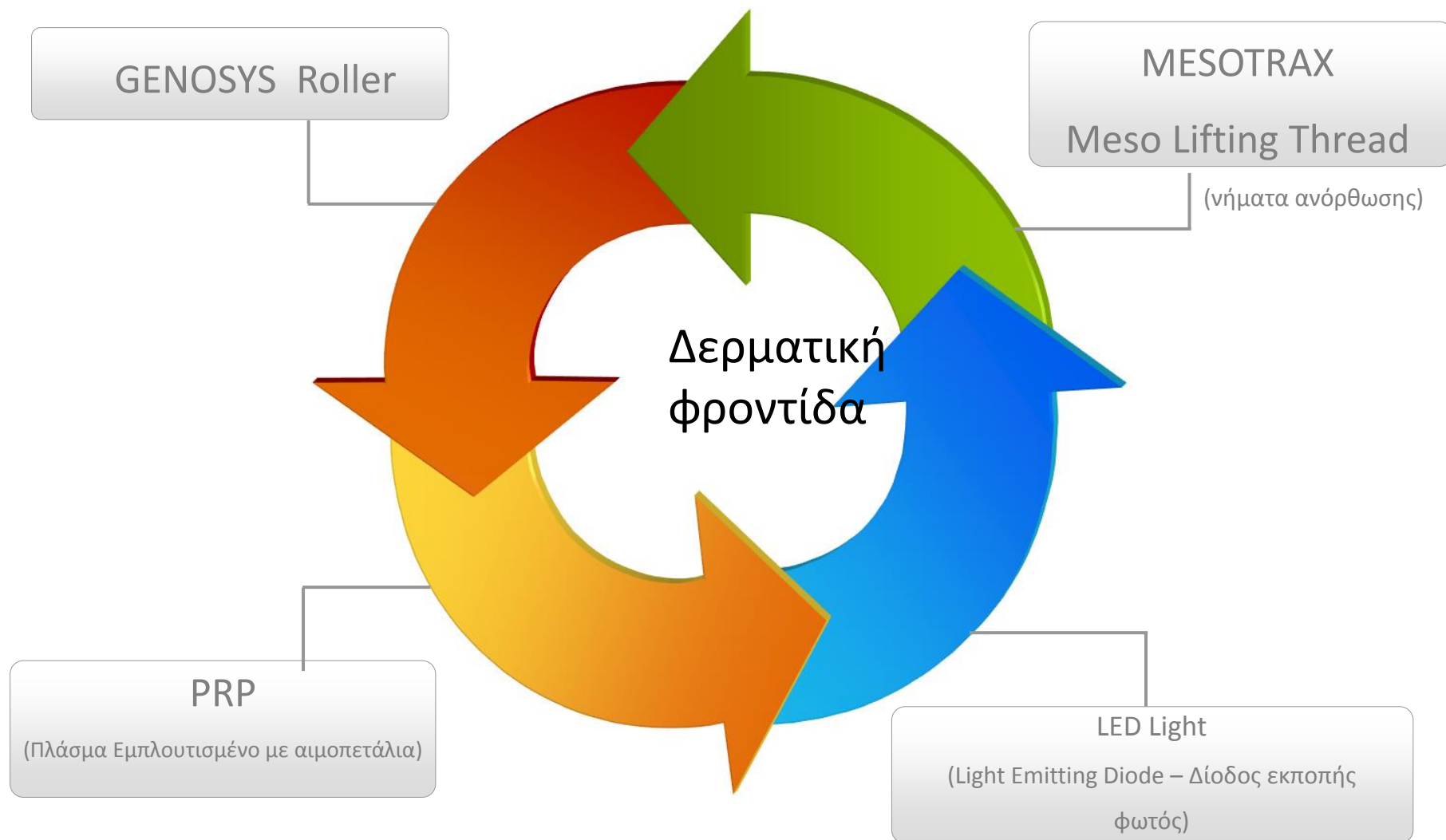

- Ανταγωνιστική τιμή
- Θολωτό σχήμα – λιγότερη απώλεια φωτός
- Άριστη διανομή της φωτεινής πηγής
- Μικρό και συμπαγές– εύκολο στη μεταφορά
- Εύκολο στην εφαρμογή

- Διατίθεται για τη θεραπεία ολόκληρου του σώματος
- Υψηλή απόδοση με τη διασφάλιση της κατάλληλης απόστασης ακτινοβολίας
- Σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής και ορθής ιατρικής πρακτικής
- Απολύτως ασφαλές


**Λογική τιμή,
πανίσχυρα αποτελέσματα**



Τα πλεονεκτήματα του OMEGA Light



- ☐ Συσκευή υπέρυθρου φωτός (SMD LED) ειδικής εγγύτητος και άριστης, ισχυρής, υψηλής φωτεινότητας.
- ☐ Λέιζερ εκπομπής μικρότερης του 1W.
- ☐ Ασφαλής θεραπεία χωρίς πόνο, φωτογήρανση, σημάδια, βλάβες θερμότητας.
- ☐ Βελτίωση σε σύνθετα δερματικά προβλήματα.
- ☐ Φως διαφορετικού μήκους κύματος (423nm~640nm)
Τέσσερα χρώματα φωτός (κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο)
- ☐ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την
GENOSYS PEPTIDE GEL MASK.
- ☐ Το κόκκινο και μπλε φως μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Ταυτόχρονα.
- ☐ Ο χρόνος χρήσης μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη θεραπεία

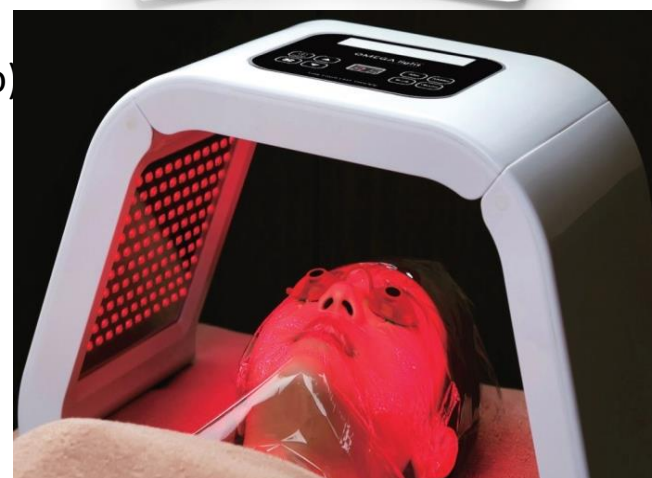

Διείσδυση μέσω της επιφανείας του δέρματος

Χωρίς να προκαλεί βλάβες στο δέρμα




Διανομή εντός του σώματος

Διανέμεται μόνο η φωτεινή ενέργεια



Μετατροπή σε χημική ενέργεια

Η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια
η οποία θεραπεύει τις κυτταρικές βλάβες

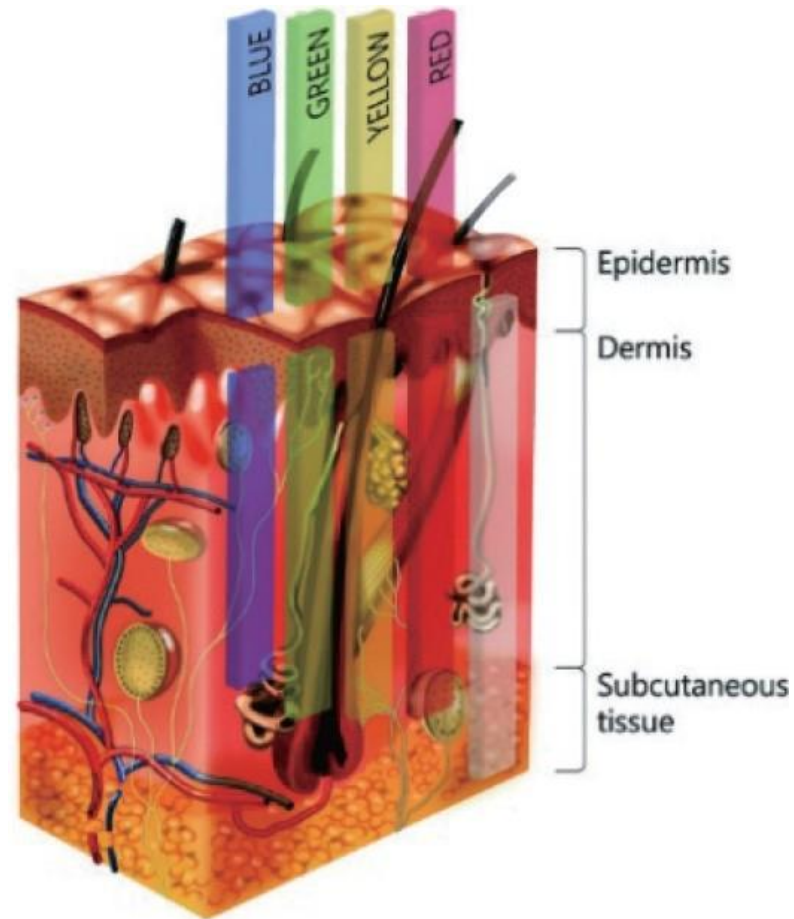

Αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της κυτταρικής μετανάστευσης

Διαφοροποίηση στο επίπεδο των Κυτοκινών, Αυξητικών παραγόντων και Μεσολαβητών φλεγμονής.

Διέγερση του ινοβλαστών που παράγουν κολλαγόνο

Αναζωογόνηση δέρματος & «γέμισμα»
Αφαίρεση λεπτών γραμμών και ρυτίδων
Βελτίωση προβληματικού δέρματος

Μήκος κύματος-δράσεις

Μήκος κύματος: 640nm
Βάθος διείσδυσης: 1-6mm

Μήκος κύματος: 423nm
Βάθος διείσδυσης: 1mm

Μήκος κύματος: 532nm
Βάθος διείσδυσης: 0.5-2mm

Μήκος κύματος: 583nm
Βάθος διείσδυσης: 1-2mm

RED light

Wavelength: 640nm
Skin penetration depth: 1-6mm



- Προώθηση της κυτταρικής αναγέννησης
- Προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος
- Ανακούφιση απο τον πόνο
- Ενεργοποίηση των δραστικών συστατικών

BLUE light

Wavelength: 423nm
Skin penetration depth: 1mm



- Καταστροφή των βακτηρίων ακμής
- Αναστολή υπερλειτουργίας σμηγματογόνων αδένων
- Πρόληψη δερματικών μολύνσεων

GREEN light

Wavelength: 532nm
Skin penetration depth: 0.5-2mm



- Καταπράυνση
- Βελτίωση του ευαίσθητου δέρματος
- Σωματική και ψυχική χαλάρωση

YELLOW light

Wavelength: 583nm
Skin penetration depth: 1-2mm



- Ανακούφιση ερυθρότητας
- Ανακούφιση ερυθήματος
- Ανακούφιση έρπητος ζωστήρα αρχικού σταδίου

LED Light Therapy

ΛΑΜΨΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ



Acne treatment



Brightening



Anti-aging

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ



Improve
edema/erythema

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ /ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ



Improve
blood circulation

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ



Hair loss care

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ



Soothing

ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ



Cell regenerative

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ




Συνεργική Δράση

GENOSYS



Βασική Θεραπεία

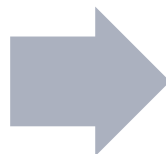

Ανακούφιση πόνου

Μείωση του χρόνου αποθεραπείας

**Αύξηση του βαθμού σύνθεσης DNA
στο σώμα**

Αύξηση της κυτταρικής δραστηριότητας

Αύξηση της δερματικής ανάπλασης

4 μήκη κύματος – ποικίλα αποτελέσματα

Χαρακτηριστικά


- Βάρος: 2.5kg / 3.5kg (μαζί με το εξωτερικό κουτί)
- Όγκος: 46*232.*31.2 / 55*27*35 (μαζί με το εξωτερικό κουτί)
- Ισχύς: Εισόδου- AC220V, 60Hz
- Εξόδου- DC 12V, 2A
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 24VA
- Πιστοποιητικά



Certificate of conformity



CE

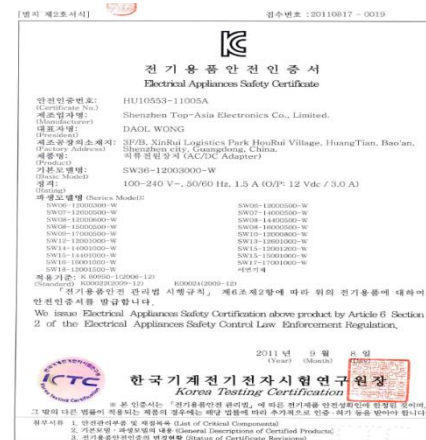

K mark(Πιστοποιητικό ασφαλείας)

Θεραπευτικό πρωτόκολλο

GENOSYS

•Βασική θεραπεία (Επιλογές)



6 POWER SOLUTIONS



PRP



MESOTRAX



GENOSYS Roller



LED Light

(Low Level LED Therapy)

: 20λεπτά



HR³ MATRIX



ND Cell



Bodycell



SRS peeling



SnowCell peeling

- Βήμα 1. SNOW O₂
- Βήμα 2. SNOW BOOSTER
- Βήμα 3. EZ CO₂ MASK



- **Βήμα 4. GENOSYS Roller + 6 Power Solutions**
(AWS, SWS, PCS, CTS, CVS, HES)

- Βήμα 5. PEPTIDE GEL MASK

+ **LED Light (Low Level LED Therapy) : 20λεπτά**

Λιπαρό δέρμα (ακνειακές τάσεις)	● Κόκκινο	● Μπλε (ακμή)
Γηρασμένο δέρμα	● Κόκκινο	
Ευαίσθητο δέρμα	● Κόκκινο	● Πράσινο
Θαμπό δέρμα	● Κόκκινο	● Κίτρινο

- Βήμα 6. SOOTHING REPAIR POSTCREAM
- Βήμα 7. MULTI SUN CREAM / INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM

Θεραπευτικό πρωτόκολλο– SRS PEELING

GENOSYS

- Βήμα 1. SNOW O₂
- Βήμα 2. SNOW BOOSTER
- Βήμα 3. EZ CO₂ MASK

- Βήμα 4. **GENOSYS Roller / Massage**

+ SRS (SKIN RENEWAL PEELING SYSTEM)

- Βήμα 5. PEPTIDE GEL MASK

+ LED Light (Low Level LED Therapy) : 20λεπτά



Λιπαρό δέρμα (ακνειακές τάσεις)	● Κόκκινο	● Μπλε (ακμή)
Γηρασμένο δέρμα	● Κόκκινο	
Ευαίσθητο δέρμα	● Κόκκινο	● Πράσινο
Θαμπό δέρμα	● Κόκκινο	● Κίτρινο

- Βήμα 6. SOOTHING REPAIR POSTCREAM
- Βήμα 7. MULTI SUN CREAM / INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM

Θεραπευτικό πρωτόκολλο– SnowCell GENOSYS

- MIX(15 λεπτά)

ENZYME POWDER + WHITENING SNOW PEEL ACTIVATOR

- Βήμα 1. SNOW O₂
- Βήμα 2. SNOW BOOSTER
- Βήμα 3. EZ CO₂ MASK
- Βήμα 4. εφαρμόστε το ενεργοποιημένο υγρό peeling



- Βήμα 5. **GENOSYS Roller / Massage**

+ WHITENING REGENERATIVE SOLUTION

- Βήμα 6. PEPTIDE GEL MASK

+ LED Light (Low Level LED Therapy) : 20λεπτά

Λιπαρό δέρμα (ακνειακές τάσεις)	● Κόκκινο	● Μπλε (ακμή)
Γηρασμένο δέρμα	● Κόκκινο	
Ευαίσθητο δέρμα	● Κόκκινο	● Πράσινο
Θαμπό δέρμα	● Κόκκινο	● Κίτρινο

- Βήμα 6. SOOTHING REPAIR POSTCREAM

- Βήμα 7. MULTI SUN CREAM / INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM

Θεραπευτικό πρωτόκολλο - ND Cell

GENOSYS

- Βήμα 1. SNOW O₂
- Βήμα 2. SNOW BOOSTER

- **Βήμα 3. GENOSYS Roller**
+ ND Cell ANTI-WRINKLE SERUM

- Βήμα 4. **LED Light (Low Level LED Therapy) : 20 λεπτά**



- Βήμα 6. ND Cell ANTI-WRINKLE CREAM / SOOTHING REPAIR POSTCREAM
- Βήμα 7. MULTI SUN CREAM / INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM

Θεραπευτικό πρωτόκολλο - Bodycell

GENOSYS

- Βήμα 1. SNOW O₂
- Βήμα 2. SNOW BOOSTER

- Βήμα 3. **GENOSYS Roller**
+ **Bodycell SM ERASER SERUM**

- Βήμα 4. **LED Light (Low Level LED Therapy) : 20 λεπτά**



- Βήμα 6. Bodycell SM ERASER CREAM / SOOTHING REPAIR POSTCREAM
- Βήμα 7. MULTI SUN CREAM / INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM

Θεραπευτικό πρωτόκολλο – HR³ MATRIX

GENOSYS

- Βήμα 1. HR³ MATRIX SCALP & HAIR SHAMPOO

- Βήμα 2. HR³ MATRIX SCALP PEELING

- **Βήμα 3. GENOSYS Roller / Stamp
+ HR³ MATRIX HAIR SOLUTION**


- Βήμα 4. **LED Light (Low Level LED Therapy) : 20 λεπτά**



- Βήμα 5. HR³ MATRIX HAIR TONIC

- Οι ασθενείς πρέπει να φοράνε προστατευτικά γυαλιά (PDT) κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Η περιοχή θεραπείας πρέπει να απολυμαίνεται.
- Μετά τη θεραπεία απαιτείται επαρκής ενυδάτωση.
- Εφαρμόστε αντιηλιακή προστασία μετά τη θεραπεία.
- Αποφύγετε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να ερεθίσει το δέρμα (αποφύγετε την άσκηση ή τη σάουνα).

Figure 8 Speed of wound healing and amelioration of sequelae

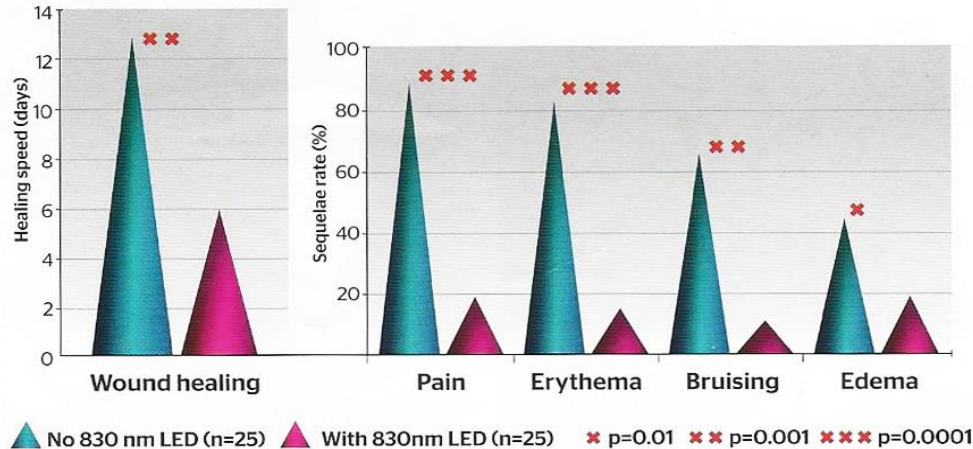

Data from a controlled study on the effect of 830 nm LED-LLLT on the speed of wound healing and amelioration of sequelae after full-face Er:YAG + CO₂ laser ablative resurfacing in 50 patients, 25 of whom received LED phototherapy¹⁹. Wound healing speed was cut by more than one-half, and the usual sequelae associated with ablative resurfacing were significantly ameliorated

[Source]

R. GLEN CALDERHEAD (2014), COMBINING MICRONEEDLE FRACTIONAL RADIOFREQUENCY AND LED PHOTOACTIVATION, *PRIME International Journal Of Aesthetic And Anti-ageing Medicine* (Vol.8, Issue 8, pp33-39)

Περιστατικό 1)



Περιστατικό 2)





[Source]

CHRISTOPHER TZERMIAS, LEONARDO MARINI (2015),
PHOTODYNAMIC THERAPY FOR ACNE MANAGEMENT, *PRIME
International Journal Of Aesthetic And Anti-ageing Medicine*
(Vol.5, Issue 4, pp22-28)

Πριν και Μετά

Περιστατικό 1

Ηλικία : Ύστερη εφηβεία (άρρεν)

Δέρμα: Ακνειακές τάσεις

Αριθμός θεραπειών : 4



Πριν



Μετά



Πριν



Μετά

Before and After

Περιστατικό 2

Ηλικία : 25 (θήλυ)

Τύπος δέρματος: Ακνειακές τάσεις, ευαίσθητο

Αριθμός θεραπειών : 5



Πριν



Μετά

Περιστατικό 3

Age : Ύστερη εφηβεία (άρρεν)

Τύπος δέρματος: Ακνειακές τάσεις

Αριθμός θεραπειών: 5



Πριν



Μετά

Πριν και μετά

Περιστατικό 4

Ηλικία : 25+ (θήλυ)

Τύπος δέρματος: Ακνειακές τάσεις, ευαίσθητο

Αριθμός θεραπειών : 7



Πριν



Μετά

Πριν και μετά

Περιστατικό 5

Ηλικία : Mid-thirties (female)

Τύπος δέρματος: Ταλαιπωρημένο, Ευαίσθητο

Αριθμός θεραπειών : 6



Πριν



Μετά

Thank you



GENOSYS